



## ANWENDUNG:



1

### Aufsetzen des Scherkopfes

- Klingenverpackung öffnen
- seitliche Markierung des Scherkopfes mit der ersten Markierung am Gerät ausrichten
- Gerät vorschieben, bis es in Höhe der zweiten Gerätmаркиering hörbar einrastet



2

### Handhabung

- den chirurgischen Rasierer wie einen Stift in der Hand halten
- behutsam und ohne Druck mit der Unterseite des Scherkopfes im 45° Winkel über die Haut gleiten



3

### Rasur (nass oder trocken)

- Gerät einschalten
- in kurzen, behutsamen Strichen rasieren
- eine Rasur gegen die Haarwuchsrichtung erzielt das beste Ergebnis



4

### Entfernen des Scherkopfes

- Gerät ausschalten
- leichten Druck mit dem Daumen im Bereich der Einkerbung auf der Rückseite des Scherkopfes ausüben
- Scherkopf vorschieben und entsorgen



5

### Reinigung und Desinfektion

- unter fließendem Wasser reinigen
- mit nicht-korrosivem Desinfektionsmittel desinfizieren



6

### Aufbewahrung

- Gerät ausschalten und in die Ladestation stellen