


# COMFORT GLIDE



## Gebruiksaanwijzing

**A** Comfort Glide Herpositionering Sheet **B** Comfort Glide wiggen **C** Comfort Glide Drypad

### Hoe de Comfort Glide Sheet en Drypad te gebruiken is

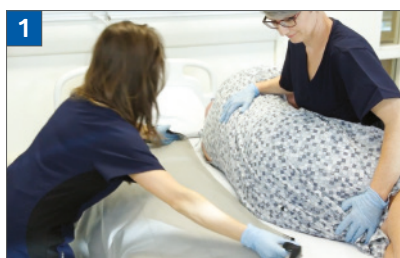

1 Ontvouw en positioneer de glide sheet naast de patiënt. Zorg ervoor dat u de bovenkant van de sheet uitlijnt met de schouders van de patiënt.



2 Plaats een Comfort Glide Drypad over de glide sheet, bedrukte zijde naar beneden.



3 Vouw de randen van beide in de lengte om onder de patiënt te stoppen.



4 Rol hierna de patiënt in de tegengestelde richting.



5 Vouw de glide sheet en het kussentje uit. Keer de patiënt voorzichtig terug naar zijn/haar rug.



6 Schuif met de handgrepen van de glide sheet voorzichtig de patiënt naar behoefte om hem/haar op het midden van het bed te leggen.

### Hoe moet u Comfort Glide Wiggen gebruiken



1 Rol de patiënt zachtjes op zijn/haar zij.



2 Lokaliseer het heiligbeen van de patiënt. Plaats een wig twee centimeter boven het heiligbeen.



3 Plaats een andere wig twee centimeter onder het heiligbeen.



4 Zorg ervoor dat de wiggen ongeveer een vuist lengte van elkaar af staan.



5 Rol de patiënt langzaam op de wiggen. Wees er zeker van dat het heiligbeen tussen de twee wiggen „drijft“.

#### Waarschuwing:

1. Comfort Glide componenten zijn niet ontworpen voor het tillen van de patiënt.
2. Niet te gebruiken in combinatie met andere hef- of positioneringsapparaten.
3. Gebruik voor de beste resultaten alleen een combinatie van Comfort Glide sheets, Wiggen en Drypads.
4. Waarschuwing: Gebruik bij het gebruik van wiggen met Comfort Glide geen Comfort Glide sheet om de patiënt op de wiggen te schuiven. Gebruik de log-Roll-methode om wiggen onder de patiënt te plaatsen.
5. Raadpleeg en volg altijd de richtlijnen van uw faciliteit voor een goede omgang met de patiënt.

Voor meer informatie over Comfort Glide, kunt u contact opnemen met uw account manager of ga naar: [www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)