

# COMFORT GLIDE



## Instruções do Produto

**A** Lençol de Reposicionamento Comfort Glide **B** Cunhas Comfort Glide **C** Protetor superabsorvente Comfort Glide

### Como usar o Lençol e o Protetor superabsorvente Comfort Glide



1 Desdobrar e posicionar o lençol ao lado do paciente. Alinhar a parte superior do lençol com os ombros do paciente.



2 Colocar um Protetor superabsorvente Comfort Glide sobre o lençol, com o lado impresso virado para baixo.



3 Dobrar as extremidades de ambos ao comprido, introduzindo-as debaixo do paciente.



4 Virar o paciente na direção oposta.



5 Desdobrar o lençol e o protetor superabsorvente. Voltar a colocar gentilmente o paciente em decúbito dorsal.



6 Usando as pegas do lençol, deslize suavemente o paciente conforme necessário para centrá-lo na cama.

### Como usar as Cunhas Comfort Glide



1 Virar o paciente com delicadeza até ficar de lado.



2 Localizar o sacro do paciente. Colocar uma cunha 5 cm acima do sacro.



3 Colocar outra cunha 5 cm abaixo do sacro.



4 Certifique-se as cunhas estão afastadas a cerca de um punho de distância.



5 Virar devagar o paciente sobre as cunhas. Certifique-se de que o sacro fica «em vão» entre as duas cunhas.

#### Atenção:

- Os componentes Comfort Glide não foram concebidos para elevar pacientes.
- Estes produtos não podem ser usados em combinação com outros dispositivos de elevação ou de posicionamento.
- Para obter os melhores resultados, use apenas uma combinação de Lençóis, Cunhas e Protetores superabsorventes Comfort Glide.
- ATENÇÃO:** Se estiver a usar cunhas com o Comfort Glide, não use um Lençol Comfort Glide para deslizar o paciente para cima das cunhas. Use o método de virar para colocar as cunhas debaixo do paciente.
- Consulte e siga sempre as orientações da sua instituição relativas ao posicionamento adequado de pacientes.

Para obter informações adicionais sobre o Comfort Glide, entre em contacto com o seu gestor de conta ou consulte: [pt.medline.eu](http://pt.medline.eu)