

A close-up photograph showing a healthcare worker's hands, wearing blue nitrile gloves, adjusting a dark blue strap on a patient lying on a table. The patient's face is visible in the background, looking towards the right. The strap is being pulled across the patient's midsection. The background is a plain, light-colored wall.

MAYOR SEGURIDAD

MAYOR EFICIENCIA.

Sistema de reposicionamiento Comfort Glide

¿CUÁLES SON LOS DESAFÍOS PRESENTES EN EL REPOSICIONAMIENTO DE PACIENTES?

Lesiones de los profesionales

Los profesionales sanitarios sufren algunos de los índices más altos de lesiones musculoesqueléticas por sobreesfuerzo, lo que se traduce en días de trabajo perdidos, permanencia reducida y millones en costes directos e indirectos.^{1,2,3}

Gestión de úlceras por presión

A pesar de los avances en la tecnología de los colchones, los pacientes inmóviles todavía corren el riesgo de desarrollar lesiones por presión. Las úlceras por presión intrahospitalarias no solo son perjudiciales en términos de atención a los pacientes, sino que también cuestan dinero a los hospitales en forma de tratamientos y hospitalización prolongada.

32 %

El levantamiento y manipulación representan más de un tercio de las lesiones de los profesionales, dando lugar a bajas por enfermedad prolongadas (más de 7 días)⁴

1 de cada 4

enfermeros/as se ha ausentado del trabajo debido a una lesión de espalda⁵

23 %

Hasta un veintitrés por ciento de los pacientes hospitalarios desarrollará una úlcera por presión.⁶

1 hora

Los pacientes pueden comenzar a desarrollar una úlcera por presión en una hora⁷

COMFORT GLIDE ES LA SOLUCIÓN

Comfort Glide proporciona a los profesionales sanitarios las herramientas necesarias para movilizar, reposicionar, girar y alzar a los pacientes según los requisitos para el manejo seguro de pacientes en su centro.

El manejo seguro de pacientes es igualmente importante tanto para los pacientes como para los profesionales. Se recomienda el cambio postural frecuente facilitado mediante ayudas de transferencia con los que reducir la fricción y la cizalla para prevenir el desarrollo de lesiones por presión.⁸

Ventajas para el profesional sanitario

- » Proporciona las herramientas adecuadas para que los profesionales sanitarios reposicionen a los pacientes
- » Mejora la seguridad y el bienestar de los trabajadores
- » Facilita el seguimiento de los protocolos del centro

Ventajas para el paciente


- » Las cuñas proporcionan la inclinación de descarga recomendada por el Panel Consultivo Europeo para las Úlceras por Presión EPUAP.
- » El protector anti humedad mantiene la piel del paciente siempre seca.
- » El sistema Comfort Glide proporciona una mejor experiencia para el paciente y mejora los resultados.



Sábanas para reposicionamiento Comfort Glide – [página 5](#)



Cuñas Comfort Glide – [página 6](#)

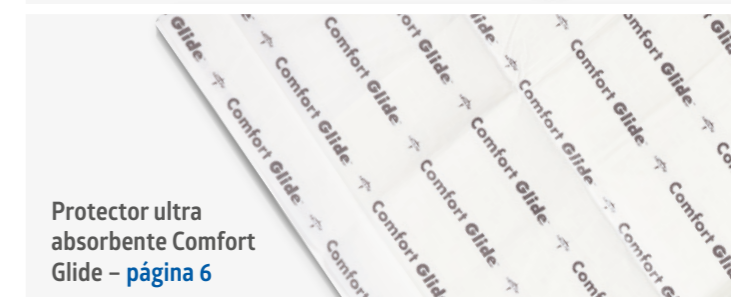

Protector ultra absorbente Comfort Glide – [página 6](#)



Longitud:
198 cm XL

Longitud:
139 cm
estándar

Reduzca el esfuerzo en realizar los cambios posturales de los pacientes.

Intuitivas y fáciles de usar, las sábanas para reposicionamiento Comfort Glide cuentan con la seguridad necesaria para acomodar a todo tipo de pacientes gracias a su capacidad de soportar 260 kilogramos de peso en la versión estándar y 453 kilogramos en la versión XL.⁹

Sábanas para reposicionamiento Comfort Glide

Estas sábanas están diseñadas y probadas para ayudar a reducir el esfuerzo necesario para el cambio postural de los pacientes.


- » La superficie inferior de nylon de baja fricción requiere un 35 % menos de esfuerzo que una sábana tradicional para iniciar y mantener el deslizamiento.¹⁰
- » Múltiples asas para optimizar la distribución del peso y el alzamiento.
- » Los materiales permeables al aire permiten que la sábana permanezca debajo de los pacientes durante un periodo de tiempo prolongado y que esté siempre disponible para ayudar en el reposicionamiento.¹¹
- » Una capa de microfibra suave y transpirable cubre toda la superficie superior para mayor comodidad del paciente y es compatible con colchones de baja pérdida de aire.¹¹



La base empírica

Fuerza media requerida para iniciar el deslizamiento


Este gráfico muestra la fuerza necesaria para iniciar el deslizamiento de un objeto de 91 kg sobre una cama de hospital.¹² Cuanto menor sea el número, más fácil es para los profesionales sanitarios iniciar el deslizamiento de un paciente.

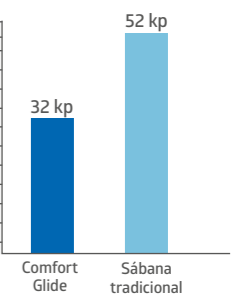

kp = kilopondio

Ensayo WVTR de transpiración

La velocidad de transmisión de vapor de agua (WVTR, por sus siglas en inglés) en unidades g/(m²*día) mide la cantidad de vapor de agua que pasa a través del material. Cuanto mayor sea el número, mayor transpiración del material.¹³

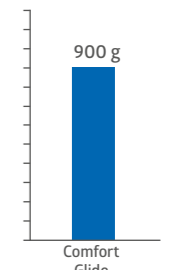

g = gramos, m² = metros cuadrados

¿Está buscando una solución reutilizable?



Con el fin de satisfacer las necesidades de su centro, también ofrecemos unas sábanas de reposicionamiento Comfort Glide reutilizables. La sábana reutilizable también está disponible en los tamaños estándar y XL.

Descargue la presión con facilidad en los puntos de alto riesgo.



Cuñas Comfort Glide

Las cuñas de espuma de alta densidad ayudan a mantener a los pacientes en la posición de inclinación de 30 grados recomendada por el Panel Consultivo Europeo para las Úlceras por Presión EPUAP, reduciendo la presión sobre las prominencias óseas.¹⁴

- » La base antideslizante se agarra a la superficie de cualquier colchón o sábana.
- » Las flechas hacia abajo «Down» garantizan una colocación adecuada.
- » El suave revestimiento de composite puede limpiarse con un paño.
- » Ofrecemos varios tipos decuñas, incluyendo los tamaños estándar y XL.

Fomenta la seguridad de la piel con una gestión efectiva de la humedad.



Protector ultra absorbente Comfort Glide

Los protectores ultra absorbentes están diseñados para controlar la humedad durante un largo periodo de tiempo y mantener la piel del paciente seca.

- » Absorbe la humedad, la mantiene alejada de la piel y está seca al tacto en cuestión de minutos¹⁵
- » Permeable al aire para una comodidad óptima del paciente con cero penetraciones^{15,16}
- » Compatible con colchones de baja pérdida de aire¹⁵
- » Tamaños estándar (91 x 144 cm) y XL (101 x 203 cm) disponibles diseñados para cubrir completamente las sábanas de reposicionamiento
- » Muestras disponibles a petición del interesado

Compre únicamente lo que necesite con un pedido personalizado.

Sábanas Comfort Glide, para un solo paciente

Referencia	Descripción	Envasado
CGSHEET	Sábana deslizante, 88,9 x 139,7 cm, con correas, capacidad de 260 kg de peso	12/envase
CGSHEETNS	Sábana deslizante, 88,9 x 139,7 cm, capacidad de 260 kg de peso	12/envase
CGSHEETXL	Sábana deslizante, XL, 106,7 x 198,1 cm, 2 correas opcionales, capacidad de 453 kg de peso	12/envase



Sábanas Comfort Glide, reutilizables

Referencia	Descripción	Envasado
CGSHEETR	Sábana deslizante reutilizable, 88,9 x 139,7 cm, capacidad de 260 kg de peso	12/envase
CGSHEETRXL	Sábana deslizante reutilizable, 106,7 x 198,1 cm, capacidad de 285 kg de peso	12/envase



Cuñas de espuma Comfort Glide, un solo paciente

Referencia	Descripción	Envasado
CGWEDGE	Cuñas de espuma de 30 grados, base antideslizante: 27,9 x 12,7 x 40,6 cm	2/bolsa, 6 bolsas/envase
CGWEDGEXL	Cuñas de espuma de 30 grados, base antideslizante: 38,1 x 16,5 x 40,6 cm	2/bolsa, 2 bolsas/envase



Protectores ultra absorbentes Comfort Glide, un solo paciente, desechables

Referencia	Descripción	Envasado
CGDRYPAD	Protector ultra absorbente, 91,4 x 144,8 cm	5/bolsa, 60/envase
CGDRYPADXL	Protector ultra absorbente XL, 101,6 x 203,2 cm	5/bolsa, 40/envase



ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARTE.



Instrucciones del producto

MEDLINE
COMFORT GLIDE

Instrucciones de uso del producto
 ■ Sabanas para reposicionamiento Comfort Glide ■ Cunas Comfort Glide
 ■ Protector ultra absorbente Comfort Glide

Cómo usar la sábana, las cunas y el protector ultra absorbente Comfort Glide

1. Despliegue y coloque la sábana para el reposicionamiento sobre el paciente. Asegure el extremo superior de la sábana con los botones de fijación.
2. Coloque el protector ultra absorbente.
3. Coloque las cunas de la cuna y asegure el protector ultra absorbente.
4. Coloque la sábana para reposicionamiento y el protector ultra absorbente sobre la sábana.
5. Coloque las cunas de la cuna y asegure el protector ultra absorbente.

Cómo usar las cunas Comfort Glide


1. Coloque el extremo del paciente de la cuna.
2. Coloque la cuna de la cuna y asegure el protector ultra absorbente.
3. Coloque la cuna de la cuna y asegure el protector ultra absorbente.
4. Coloque la cuna de la cuna y asegure el protector ultra absorbente.
5. Coloque la cuna de la cuna y asegure el protector ultra absorbente.

Precauciones:
 1. Los productos Comfort Glide no están diseñados para ser utilizados por profesionales sanitarios.
 2. Antes de utilizarlos, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.
 3. Para obtener los mejores resultados, utilice únicamente una combinación de sábana, cuna y protector ultra absorbente.
 4. ATENCIÓN: Si una cuna Comfort Glide no se utiliza correctamente, puede causar lesiones al paciente.
 5. Coloque la cuna de la cuna y asegure el protector ultra absorbente.

Importante: Este producto no debe utilizarse en pacientes con heridas abiertas o quemaduras graves.

© 2019 Medline Industries, Inc. Todos los derechos reservados. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, Inc. en EE.UU. y otros países.

Árbol de decisiones

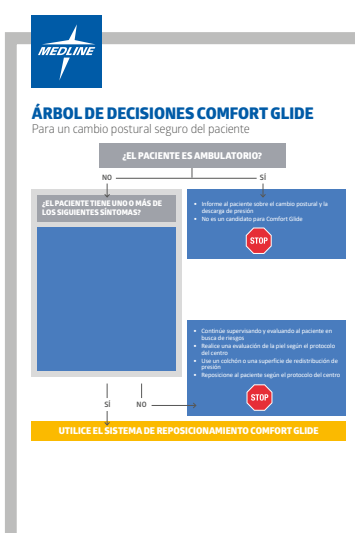

¿Quiere saber más? Póngase en contacto con su comercial de Medline o visítenos en nuestra página web: www.medline.eu/es



**ALWAYS
ON.**

Medline International Iberia S.L.U
 Parque Empresarial San Fernando
 Avenida de Castilla 2
 Edificio Munich, Planta Baja
 28830 San Fernando de Henares
 Madrid
 España
 Tfno: +34 900 600 602
 Fax: +34 900 600 603
www.medline.eu/es
es-atencioncliente@medline.com

References: 1 de Castro AB. Handle With Care®: The American Nurses Association's Campaign to Address Work-Related Musculoskeletal Disorders. The Online Journal of Issues in Nursing. 2004;9(3). Available at <http://www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ANAMarketplace/ANAPeriodicals/OJIN/Tables/Contents/Vol9No3/04/HandleWithCare.html> Accessed 2 October 2015. 2 Safe Patient Handling – Preventing Musculoskeletal Disorders in Nursing Homes. Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Available at <https://www.osha.gov/Publications/OSHA3708.pdf> Accessed 2 October 2015. 3 RIDDOR 2013/14. HSE. (2009). 4 "Easy positioning of in-bed patients with reduced mobility" EU Commission. 5 Moore, Z. "Patient Safety & Pressure Ulcers". EWMA policy paper (2013). 6 Gefen A. "How much time does it take to get a pressure ulcer? Integrated evidence from human, animal, and in vitro studies." (2008). 8 Data on file, available upon request. 9 Safe Patient Handling. Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Available at: www.osha.gov/SLTC/healthcarefacilities/safepatienthandling.html Accessed 26 April 2017. 10 – 16 Data on file, available upon request.

Los productos Comfort Glide son productos sanitarios no estériles de clase I destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios. Antes de utilizarlos, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.



Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France



Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de corregir cualquier error que pueda haberse producido.
 © 2019 Medline Industries, Inc. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, Inc. ML868-ES01/AN 10/2019.