

Comfort Glide Keile



Schaumstoffkeile mit hoher Dichte helfen, den Patienten in der von der EPUAP empfohlenen 30-Grad-Positionierung zu halten und den Druck auf die Knochenvorsprünge zu verringern.¹

- » Die rutschfeste Unterlage sorgt für guten Halt auf Matratzen und Bettlaken.
- » Durch die Pfeile „Unten“ werden die Keile sicher platziert.
- » Der weiche Verbundstoffbezug kann abgewischt werden.
- » Wir bieten eine Vielzahl von Einweg- und wiederverwendbaren Keilen an, darunter Standard- und Übergrößen.

Um eine optimale Entlastung und Unterstützung zu gewährleisten, sollten beide Keile gemäß den nachstehenden Anweisungen verwendet werden.



Wie verwendet man Comfort Glide Keile?




1 Drehen Sie den Patienten auf die Seite.



2 Lokalisieren Sie das Kreuzbein des Patienten. Positionieren Sie einen Keil zwei Zentimeter oberhalb des Kreuzbeins.



3 Legen Sie nun den anderen Keil zwei Zentimeter unterhalb des Kreuzbeins.

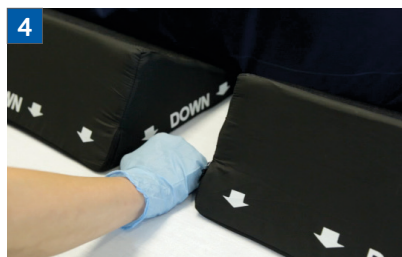

4 Achten Sie darauf, dass die Keile etwa eine Handbreit auseinander liegen.



5 Rollen Sie den Patienten langsam auf die Keile. Achten Sie darauf, dass das Kreuzbein zwischen den beiden Keilen „schwebt“.

Achtung:

1. Vorsicht: Wenn Sie Keile mit Comfort Glide verwenden, benutzen Sie kein Comfort Glide-Umlagerungstuch, um den Patienten auf die Keile zu bewegen. Verwenden Sie das Log-Roll-Manöver, um die Keile unter den Patienten zu schieben.
2. Beachten und befolgen Sie stets die Richtlinien Ihrer Einrichtung für den richtigen Umgang mit Patienten.



Medline International Germany GmbH
Medline-Straße 1-3
47533 Kleve
Deutschland
Tel.: +49 2821 7510-0

www.medline.eu/de
de-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associates SA
1204 Genf
Schweiz
Tel.: +41 848 244 433

www.medline.eu/ch
ch-customerservice@medline.com

Medline Austria GmbH
c/o CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld, Hlawati
Parkring 2
1010 Wien
Österreich
Tel.: +43 800 201 878
www.medline.eu/at
at-customerservice@medline.com

FOLGEN SIE UNS  

¹ Daten auf Anfrage erhältlich.

Comfort Glide sind unsterile Medizinprodukte der Klasse I und für die Nutzung durch medizinisches Fachpersonal entwickelt. Bitte beachten Sie vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung und die Vorsichtsmaßnahmen auf dem Etikett beachten.



Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Frankreich



Wir behalten uns das Recht vor, etwaige Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2022 Medline ist ein eingetragenes Warenzeichen von Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1271_DE 06/2022