

Cuñas Comfort Glide



Las cuñas de espuma de alta densidad ayudan a mantener a los pacientes en la posición de inclinación de 30 grados recomendada por el Panel Consultivo Europeo para las Úlceras por Presión (EPUAP), ayudando a reducir la presión sobre los huesos.¹

- » La base antideslizante se agarra a la superficie de cualquier colchón o sábana.
- » Las flechas hacia abajo «Down» garantizan una colocación adecuada.
- » El suave revestimiento puede limpiarse con un paño.
- » Ofrecemos una amplia gama de cuñas para pacientes de un solo uso y reutilizables, incluyendo los tamaños estándar y XL.

Para obtener una mayor superficie de descarga y sujeción óptimas, asegúrese de utilizar AMBAS cuñas de acuerdo con las siguientes instrucciones.



Cómo usar las cuñas Comfort Glide




1 Gire suavemente al paciente de lado.



2 Localice el sacro del paciente. Coloque una cuña 5 cms por encima del sacro.



3 Coloque otra cuña 5 cms por debajo del sacro.

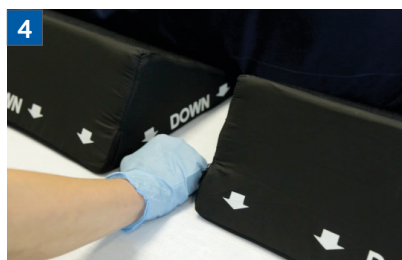

4 Asegúrese de que las cuñas estén aproximadamente a un puño de distancia.



5 Gire lentamente al paciente sobre las cuñas. Asegúrese de que el sacro esté «flotando» entre las dos cuñas.

Precaución:

1. ATENCIÓN: Si usa las cuñas Comfort Glide, no use una sábana Comfort Glide para colocar al paciente sobre las cuñas. Utilice el método de giro en bloque para colocar las cuñas debajo del paciente.
2. Consulte y siga siempre las pautas de su centro para el manejo adecuado del paciente.



Medline International Iberia S.L.U
Parque Empresarial San Fernando
Edificio Munich, Planta Baja, local B
Avenida de Castilla 2
28830 San Fernando de Henares
Madrid
España
Tfno: +34 900 600 602

www.medline.eu/es
es-atencioncliente@medline.com

SÍGANOS



¹ Datos de archivo disponibles bajo petición.

Los productos Comfort Glide son productos sanitarios no estériles de clase I destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios. Antes de utilizarlos, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Francia



Nos reservamos el derecho de corregir cualquier error que pudiera aparecer en este folleto.

© 2022 Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML1271_ES 05/2022