

Cales Comfort Glide



Les cales fabriquées en mousse à haute densité aident à maintenir le patient en position inclinée à 30 degrés, comme recommandé par l'EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel). Elles contribuent ainsi à réduire la pression sur les proéminences osseuses.¹

- » La base antidérapante s'agrippe à la surface de n'importe quel matelas ou tissu.
- » Les flèches vers le bas (« Down ») assurent un positionnement correct.
- » Le revêtement en tissu composite souple peut être facilement nettoyé avec un linge humide.
- » Nous proposons des cales à usage patient unique et réutilisables, en tailles standard et XL.

Pour un déchargement et un soutien optimal, assurez-vous que LES DEUX cales sont utilisées conformément aux instructions ci-dessous.



Guide d'utilisation des cales Comfort Glide




1 Basculez doucement le patient sur le côté.



2 Localisez le sacrum du patient. Placez une cale 5 centimètres au-dessus du sacrum.



3 Placez l'autre cale 5 centimètres au-dessous du sacrum.

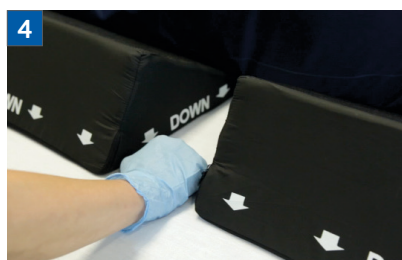

4 Assurez-vous que les cales sont à environ 10 cm l'une de l'autre.



5 Basculez lentement le patient sur les cales. Assurez-vous que le sacrum est situé entre les deux cales.

Attention :

1. ATTENTION : N'utilisez pas le drap Comfort Glide pour faire glisser le patient sur les cales. Utilisez la méthode de basculement de notre guide pour placer les cales sous le patient.
2. Consultez et suivez toujours les directives de votre établissement pour une manipulation appropriée du patient.



Medline International France SAS
2 Rue Rene Caudron
Batiment 13F
Parc D Affaires le Val Saint Quentin
78960 Voisins-le-Bretonneux
France
Tel: +33 1 30 05 34 34

www.medline.eu/fr
fr-customerservice@medline.com

Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
Belgique
Tel: +32 2 808 74 93

www.medline.eu/be
be-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associés SA
1204 Genève
Suisse
Tel. +41 848 244 433

www.medline.eu/ch
ch-customerservice@medline.com

SUIVEZ-NOUS  

¹ Données disponibles sur demande.

Les produits Comfort Glide sont des dispositifs médicaux non stériles de classe I destinés à être utilisés par des professionnels de santé. Avant utilisation, consultez les instructions et les précautions d'usage sur l'étiquette correspondante.



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France



Nous nous réservons le droit de corriger toutes les erreurs susceptibles d'apparaître dans cette brochure.

© 2022 Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, États-Unis. ML1271_FR 05/2022