

Cunei Comfort Glide



I cunei in schiuma ad alta densità aiutano a mantenere i pazienti nella posizione di inclinazione di 30 gradi raccomandata dall'EPUAP, contribuendo a ridurre la pressione sulle prominenze ossee.¹

- » La base antiscivolo aderisce alla superficie di qualsiasi materasso o biancheria.
- » le frecce "down" indicano il posizionamento corretto.
- » Il rivestimento in tessuto composito morbido può essere pulito con un panno.
- » Offriamo una varietà di cunei monopaziente e riutilizzabili, comprese le misure standard e X-large.

Per uno scarico e un sostegno ottimali, assicurarsi che ENTRAMBI i cunei siano utilizzati secondo le istruzioni seguenti.



Come utilizzare i cunei Comfort Glide




1 Ruotare delicatamente il paziente su un lato.



2 Localizzare la zona sacrale del paziente. Posizionare un cuneo 5 cm. sopra la zona sacrale.



3 Posizionare un altro cuneo 5 cm. sotto l'osso sacro.

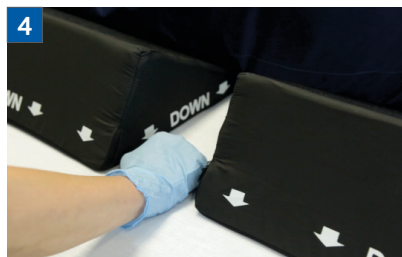

4 Assicurarsi che i cunei siano distanti circa un palmo.



5 Ruotare lentamente il paziente sui cunei. Assicurarsi che la zona sacrale sia "sospesa" tra i due cunei.

Attenzione:

1. **ATTENZIONE:** Se utilizzate i cunei con Comfort Glide, non utilizzare il telo di posizionamento per far scivolare il paziente sui cunei. Utilizzare il metodo di rotazione per posizionare i cunei sotto il paziente.
2. Fate sempre riferimento e seguite le linee guida della vostra struttura per una corretta procedura di riposizionamento del paziente.



Medline International Italy s.r.l. Unipersonale
Piazzale della Resistenza 3
50018 Scandicci
Firenze
Italia
Tel.: +39 55 776 65 11

www.medline.eu/it
it-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associes SA
1204 Ginevra
Svizzera
Tel. +41 848 244 433

www.medline.eu/ch
ch-customerservice@medline.com

SEGUITECI



¹ Dati su file disponibili su richiesta

I prodotti Comfort Glide sono dispositivi medici non sterili di classe I destinati all'uso da parte degli operatori sanitari. Prima dell'uso, consultare le istruzioni e le avvertenze riportate in etichetta.

Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori presenti in questa brochure.

© 2022 Medline è un marchio registrato di Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1271_IT 05/2022



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Francia

