


Cunhas Comfort Glide



As cunhas de espuma de alta densidade ajudam a manter os pacientes na posição de inclinação de 30 graus recomendada pela EPUAP, ajudando a reduzir a pressão nas proeminências ósseas.¹

- » A base antiderrapante prende-se à superfície de qualquer colchão ou roupa de cama.
- » As setas «para baixo» asseguram uma colocação adequada.
- » O revestimento em tecido compósito macio pode ser limpo.
- » Oferecemos uma variedade de cunhas reutilizáveis e de utilização única, incluindo tamanhos standard e tamanhos XL.

Para um apoio e descarga ideais, certifique-se de que AMBAS as cunhas são usadas segundo as instruções que se seguem.

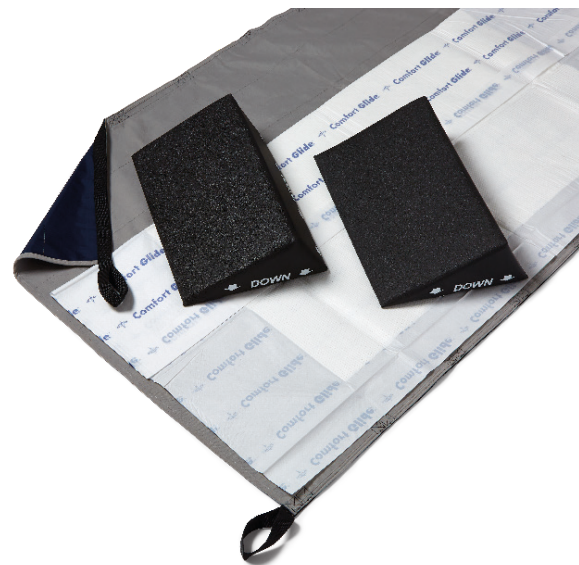

Como usar as Cunhas Comfort Glide




1 Rebolar o paciente com delicadeza até ficar de lado.



2 Localizar o sacro do paciente. Colocar uma cunha 5 cm acima do sacro.



3 Colocar outra cunha 5 cm abaixo do sacro.

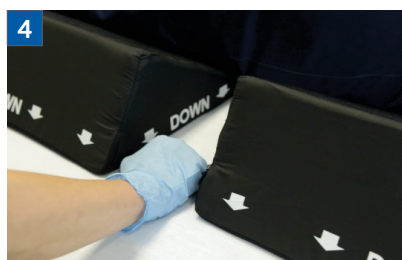

4 Certifique-se as cunhas estão afastadas a cerca de um punho de distância.



5 Rebolar devagar o paciente sobre as cunhas. Certifique-se de que o sacro fica «em vazio» entre as duas cunhas.

Atenção:

1. ATENÇÃO: Se estiver a usar cunhas com o Comfort Glide, não use um Lençol Comfort Glide para deslizar o paciente para cima das cunhas. Use o método de rebolar para colocar as cunhas debaixo do paciente.
2. Consulte e siga sempre as orientações da sua instituição relativas ao manuseamento adequado de pacientes.



Medline International Portugal Unipessoal LDA
Avenida do Brasil, 43-3º Direito
1700-062 Lisboa
Portugal
Linha Azul: +351 808 291 921

www.medline.eu/pt
pt-atenciaocliente@medline.com

SIGA-NOS



¹ Dados arquivados, disponíveis mediante pedido.

Os produtos Comfort Glide são dispositivos médicos de classe I não-estéreis destinados a ser utilizados por profissionais de saúde. Antes de utilizar, consultar as instruções e precauções na respetiva rotulagem.



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, França



Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ocorrer nesta brochura.

© 2022 Medline é uma marca registada da Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EUA. ML1271_PT 05/2022