



## INSERTION DE CATHÉTER CENTRAL CUHG1-INT

Retirez Compass UniversalHg de son emballage stérile.

Activez et calibrez Compass UniversalHg en appuyant sur le bouton bleu pendant environ une seconde, jusqu'à ce que l'affichage indique «00 mm» (Figure 1).

**Attention : Activez et calibrez Compass UniversalHg avant de le fixer aux accessoires pour éviter une pression de base incorrecte.**

Retirez le capuchon proximal Luer (Figure 2). Le retrait de ce capuchon avant l'étalonnage n'affecte pas la lecture.

Fixez l'aiguille d'introduction et la seringue au Compass UniversalHg (Figure 3).

Insérez l'aiguille d'introduction dans la veine centrale ou dans un autre vaisseau.

Vérifiez l'accès au vaisseau en utilisant le relevé de pression. La pression est affichée sur l'écran LCD du Compass UniversalHg (Figure 4).

Insérez le fil-guide (jusqu'à 0,096 cm de diamètre) dans l'orifice du fil-guide du Compass UniversalHg et ensuite dans le vaisseau (Figure 5). De plus petits fils-guides peuvent nécessiter l'utilisation de l'outil d'insertion du fil-guide.

Autre technique : Retirez la seringue et insérez le fil-guide à travers l'orifice de la seringue du Compass UniversalHg.






Maintenez le fil-guide en place et retirez l'aiguille d'introduction et le Compass UniversalHg.

Réaliser l'insertion du cathéter conformément aux instructions de son fabricant.

### Mise hors tension et recalibrage du dispositif

Appuyez trois fois sur le bouton selon la séquence 'POUSSER-POUSSER-MAINTENIR ENFONCÉ' (c'est-à-dire, appuyez rapidement deux fois sur le bouton puis maintenez enfoncé le troisième bouton jusqu'à ce que le dispositif s'éteigne). Pour recalibrer et mettre à zéro le dispositif, ouvrez-le à l'air libre et appuyez sur l'interrupteur jusqu'à ce que l'écran affiche «00 mm».

Pour les instructions complètes et leurs avertissements, veuillez consulter le manuel d'utilisation fourni avec le dispositif.

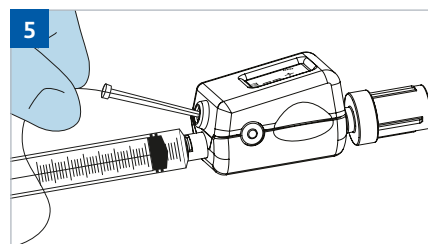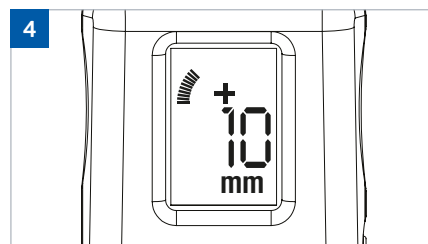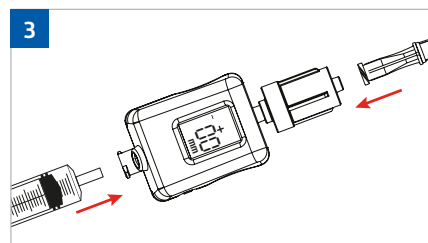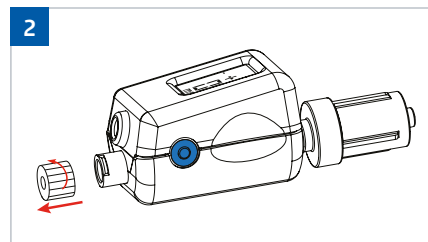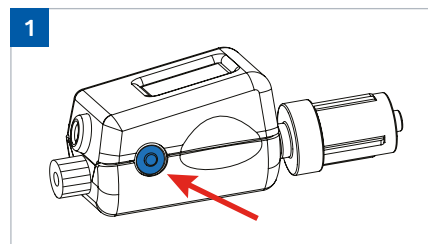

**ALWAYS  
ON.**

Medline International France SAS  
Le Val St-Quentin  
2 Rue René Caudron  
Bâtiment 13F  
78960 Voisins-le-Bretonneux  
France  
Tel: +33 1 30 05 34 00  
Fax: +33 1 30 05 34 43  
[www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)  
[fr-customerservice@medline.com](mailto:fr-customerservice@medline.com)

Medline International Belgium SPRL  
Pegasuslaan 5  
B-1831 Diegem  
Belgique  
Tel: +32 2 808 7493  
Fax: +32 2 808 7495  
[www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)  
[be-customerservice@medline.com](mailto:be-customerservice@medline.com)

Medline International Switzerland Sàrl  
1 Place de Longemalle  
1204 Genève  
Suisse  
Tel. +41 848 244 433  
Fax. +41 848 244 100  
[www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)  
[ch-customerservice@medline.com](mailto:ch-customerservice@medline.com)