



CENTURION
MEDICAL PRODUCTS

USO GENERAL CUHG1-INT

Extraer Compass UniversalHg de su envase estéril. Retirar el tapón luer proximal.

Para medir la presión compartimental:

Conectar el extremo distal del dispositivo a una aguja 18G. El extremo proximal del dispositivo se puede conectar a cualquier jeringa que contenga solución salina estéril.

Cebiar el dispositivo con solución salina estéril. Después, manteniendo el dispositivo en el ángulo de inserción, presione el botón de encendido azul en el costado hasta que lea '00 mm' (Figura 1). Introducir la aguja en el tejido hasta alcanzar el compartimento.

Presione la jeringa e inyecte aproximadamente 0.3 cc de solución salina para garantizar que no haya tejido subcutáneo bloqueando la punta. Después de inyectar la solución salina, simplemente leer la presión compartimental.

Para otros usos:

Activar y calibrar Compass UniversalHg pulsando el botón azul de encendido durante aproximadamente un segundo hasta que se muestre «00 mm» en la pantalla (Figura 1).

Activar y calibrar Compass UniversalHg antes de acoplar accesorios para evitar una presión basal incorrecta. Este paso se debe obviar si se va a aplicar para presión compartimental.

En función de su aplicación, conectar un accesorio (por ejemplo, jeringa de descarga, llave de 3 vías, tubo IV o de extensión) al puerto de seguridad luer proximal de Compass UniversalHg (Figura 2).

En función de su aplicación, conectar el luer lock macho distal de Compass UniversalHg a un accesorio (por ejemplo, aguja, luz distal de una vía central, set de extensión o válvula sin aguja en contacto con el paciente) (Figura 3).






La presión aparece en la pantalla LCD de Compass UniversalHg (Figura 4).

Si el procedimiento es viable, introducir un cable guía (hasta 0,096 cm de diámetro) a través del puerto para cables guía de Compass UniversalHg y al vaso sanguíneo (Figura 5). Los cables guía más pequeños pueden necesitar el uso de la herramienta de introducción para cables guía que viene en el envase del cable guía.

Apagado del dispositivo y recalibración

Pulsar el botón tres veces con una secuencia «PULSAR – PULSAR – MANTENER» (es decir, pulsar rápidamente el botón dos veces y después mantener pulsado el botón hasta que el dispositivo se apague). Para recalibrar y poner a cero el dispositivo, abrir el dispositivo y pulsar el botón de encendido hasta que se vea «00 mm» en la pantalla.

Para ver las instrucciones y las advertencias completas, consultar las instrucciones de uso incluidas en el dispositivo.

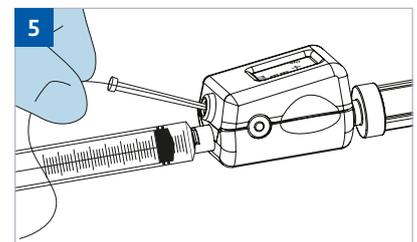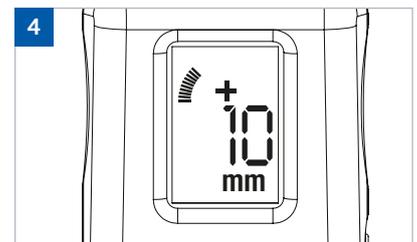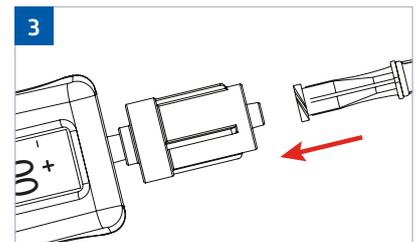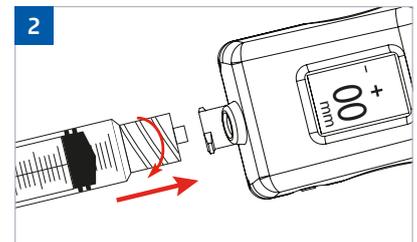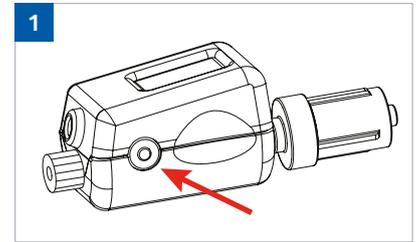

Medline International Iberia S.L.U
Parque Empresarial San Fernando
Avenida de Castilla 2
Edificio Munich, Planta Baja
28830 San Fernando de Henares
Madrid
España
Tfno: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.eu/es
es-atencioncliente@medline.com