



CENTURION
MEDICAL PRODUCTS

USAGE GÉNÉRAL CUHG1-INT

Retirez le Compass UniversalHg de son emballage stérile.

Enlevez le bouchon Luer proximal.

Pour la mesure de pression des loges :

Connecter l'extrémité distale du dispositif à une aiguille de 18G. L'extrémité distale du dispositif peut être attachée à tout type de seringue contenant de la solution saline stérile.

Rincer le dispositif avec la solution saline. Ensuite, maintenir le produit proche du site d'insertion avec un angle de 90°. Appuyer sur le bouton sur le côté du dispositif jusqu'à ce que la valeur "00" s'affiche sur l'écran (Figure 1). Insérer l'aiguille jusqu'à atteindre la loge où s'effectuera la mesure.

Appuyez sur la seringue et injectez environ 0,3 cc de solution saline pour vous assurer qu'il n'y a pas de tissu sous-cutané bloquant la pointe. Après l'injection de solution saline, la mesure de pression de la loge s'affiche sur l'écran du dispositif.

Pour d'autres applications :

Activez et calibrez le Compass UniversalHg en appuyant sur l'interrupteur bleu pendant environ une seconde, jusqu'à ce que l'affichage LCD indique «00 mm» (Figure 1).

Activez et calibrez le Compass UniversalHg avant de fixer les accessoires pour éviter une pression de référence incorrecte. Cette étape de la séquence doit être passée lors de la mesure de la pression intra-compartimentale.

En fonction de l'application, fixez un accessoire (par exemple une seringue de rinçage, un robinet d'arrêt, une extension ou une tubulure intraveineuse), à l'extrémité Luer proximale du Compass UniversalHg (Figure 2).

Selon l'application, connectez l'extrémité Luer distale du Compass UniversalHg à un accessoire (par exemple une aiguille, un cathéter central, un set de tubulure avec extension ou une valve sans aiguille en contact avec le patient) (Figure 3).






La pression s'affiche sur l'écran LCD du Compass UniversalHg (Figure 4).

Au besoin, insérez le fil-guide (diamètre maximum 0,096 cm) dans l'orifice réservé au fil-guide du Compass UniversalHg. (Figure 5). L'utilisation d'un outil d'insertion de fil-guide pourra être nécessaire pour les petits dispositifs.

Mise hors tension et recalibrage du dispositif :

Appuyez trois fois sur le bouton selon la séquence 'POUSSER-POUSSER-MAINTENIR ENFONCÉ' (autrement dit, appuyez deux fois rapidement sur le bouton, puis maintenir la pression sur bouton jusqu'à ce que le dispositif se mette hors tension). Pour recalibrer et mettre à zéro le dispositif, ouvrez-le à l'air libre et appuyez sur l'interrupteur jusqu'à ce que l'écran affiche «00 mm».

Pour les instructions complètes et leurs avertissements, veuillez consulter le manuel d'utilisation fourni avec le dispositif.

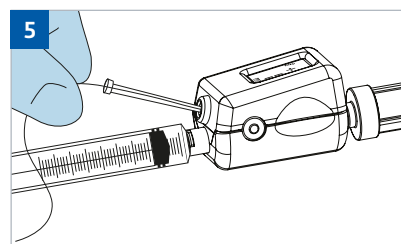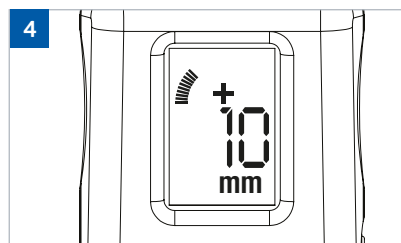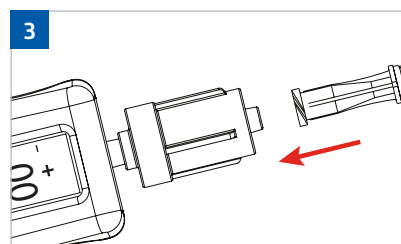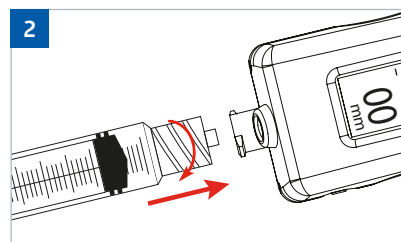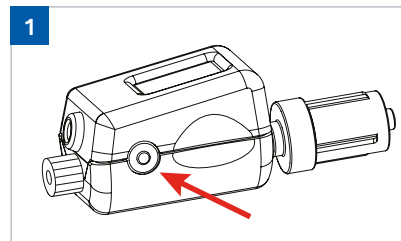

**ALWAYS
ON.**

Medline International France SAS
Le Val St-Quentin
2 Rue René Caudron
Bâtiment 13F
78960 Voisins-le-Bretonneux
France
Tel: +33 1 30 05 34 00
Fax: +33 1 30 05 34 43
www.medline.eu/fr
fr-customerservice@medline.com

Medline International Belgium SPRL
Pegasuslaan 5
B-1831 Diegem
Belgique
Tel: +32 2 808 7493
Fax: +32 2 808 7495
www.medline.eu/fr
be-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle
1204 Genève
Suisse
Tel: +41 848 244 433
Fax: +41 848 244 100
www.medline.eu/fr
ch-customerservice@medline.com