



CENTURION
MEDICAL PRODUCTS

UTILIZZO GENERICO CUHG1-INT

Rimuovere il misuratore di pressione Compass UniversalHg dalla sua confezione sterile.

Rimuovere il tappo luer prossimale.

Per la misurazione della pressione compartmentale:

collegare l'estremità distale del dispositivo ad un ago di calibro 18. L'estremità prossimale del dispositivo può essere collegata a qualsiasi siringa che contenga una soluzione salina sterile.

Riempire il dispositivo con la soluzione salina. Successivamente, tenendo il dispositivo con l'angolo d'inserimento, premere il pulsante di accensione blu sul lato fino a quando non viene visualizzato "00 mm" (Figura 1). Inserire l'ago nel tessuto fino al raggiungimento del compartimento

Premere la siringa e iniettare circa 0,3 cc di soluzione salina per assicurarsi che non ci sia tessuto sottocutaneo che blocca l'estremità distale del dispositivo. Dopo aver infuso la soluzione salina, leggi semplicemente la Pressione Compartmentale

Per altre applicazioni:

attivare e calibrare l'apparecchio premendo il bottone blu di accensione per circa un secondo, cioè fino a quando sul display non comparirà la lettura '00 mm' (Figura 1).

Le operazioni di attivazione e calibratura devono essere effettuate prima di collegare lo strumento agli accessori, per non incorrere in una misurazione errata della pressione basale. L'unica eccezione a questa sequenza di fasi riguarda l'impiego in presenza di pressione compartmentale.

A seconda del diverso utilizzo, collegare un accessorio (ad es. una siringa per il lavaggio, un rubinetto, un tubo di estensione o da infusione endovenosa) alla porta prossimale con raccordo luer lock femmina dell'apparecchio Compass UniversalHg (Figura 2).

In rapporto al tipo di impiego specifico, connettere l'estremità distale dello strumento, dotata di raccordo luer lock maschio, ad un accessorio (per es. ago, lume distale di un catetere venoso centrale, set per estensione o valvola d'accesso senza ago a contatto con il paziente) (Figura 3).






I valori pressori sono presenti sul display a cristalli liquidi dell'apparecchio Compass UniversalHg (Figura 4).

Se la procedura lo prevede, inserire il catetere guida (fino a 0.096 cm di diametro) attraverso l'apposita porta dello strumento e successivamente nel vaso sanguigno (Figura 5). Cateteri guida più piccoli potrebbero richiedere l'utilizzo di un dispositivo per l'inserzione con relativo supporto per il catetere stesso.

Spegnimento dello Strumento e Ricalibratura:

esercitare una pressione per tre volte sul bottone seguendo la sequenza 'PREMERE - PREMERE - TENERE PREMUTO' (ovverosia premere rapidamente il bottone due volte per poi tenerlo premuto una terza fino allo spegnimento dello strumento). Per ricalibrare ed azzerare l'apparecchio, esporlo alla pressione atmosferica e premere il bottone di accensione fino al comparire della lettura '00 mm' sul display.

Nelle istruzioni allegate allo strumento potrete trovare integralmente le avvertenze e le modalità d'utilizzo.

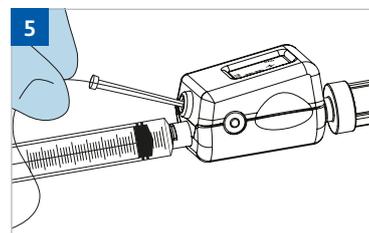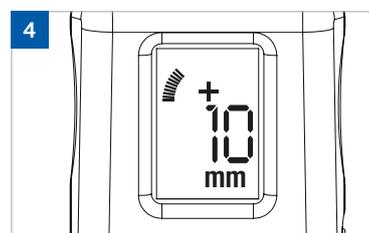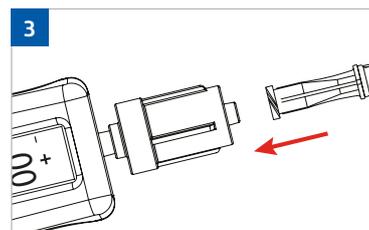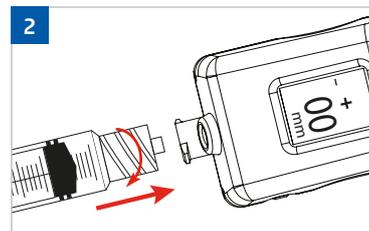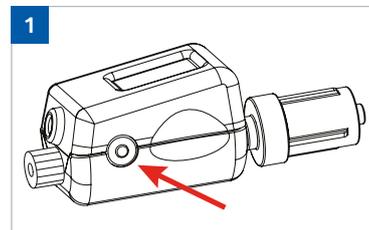

**ALWAYS
ON.**

Medline International Italy s.r.l. Unipersonale

Piazzale della Resistenza 3
50018 Scandicci
Firenze

Italia
Tel.: +39 55 776 65 11
Fax: +39 55 34 01 12

www.medline.eu/it
it-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl

1 Place de Longemalle
1204 Ginevra
Svizzera

Tel. +41 848 244 433
Fax: +41 848 244 100

www.medline.eu/it
ch-customerservice@medline.com