



## UTILIZAÇÃO GERAL

### CUHG1-INT

Remover o Compass UniversalHg da embalagem estéril.

Remover a tampa Luer proximal.

#### Para medir a pressão compartmental:

Ligue a ponta distal do dispositivo a uma agulha de calibre 18. A extremidade proximal do dispositivo pode ser ligada a qualquer seringa que contenha soro fisiológico estéril.

Irrigue o dispositivo com soro fisiológico. Em seguida, com o dispositivo disposto no ângulo de introdução, carregue no botão de ligação azul na lateral até ser exibido «00 mm» (Figura 1). Introduza a agulha no tecido até alcançar o compartimento.

Prima a seringa e injete aproximadamente 0,3 cc de soro fisiológico, para se certificar de que não existe tecido subcutâneo a bloquear a ponta. Depois da infusão com soro fisiológico, faça a leitura da pressão do compartimento.

#### Para outras aplicações:

Ativar e calibrar o Compass UniversalHg pressionando o botão de energia azul durante aproximadamente um segundo até que no LCD seja apresentado «00 mm» (Figura 1).

Ativar e calibrar o Compass UniversalHg antes de o ligar aos acessórios para evitar uma pressão inicial incorreta. A exceção a este passo de sequência é com aplicação de pressão compartmental.

Consoante a aplicação, ligar um acessório (por exemplo, a seringa de lavagem, torneira, extensão ou tubagem IV) na porta Luer Lock fêmea proximal do Compass UniversalHg (Figura 2).

Consoante a aplicação, ligar a extremidade Luer Lock macho distal do Compass UniversalHg a um acessório (por exemplo, agulhas, lúmen distal de um cateter venoso central, conjunto de extensão ou válvula sem agulha em contacto com o doente) (Figura 3).






A pressão é exibida no LCD do Compass UniversalHg (Figura 4).

Se o procedimento assim o ditar, introduzir o fio-guia (até 0,096 cm de diâmetro) através da porta para fios-guia do Compass UniversalHg e no vaso (Figura 5). Os fios-guia mais pequenos poderão exigir a utilização da ferramenta de introdução de fio-guia que acompanha o suporte do fio-guia.

#### Desligar e recalibrar o dispositivo

Pressionar o botão três vezes numa sequência «PRESSIONAR - PRESSIONAR - MANTER PRESSIONADO» (ou seja, pressionar o botão rapidamente duas vezes seguidas e depois à terceira manter o botão pressionado até o dispositivo se desligar). Para recalibrar e repor o dispositivo a zero, abrir o dispositivo para a atmosfera e pressionar o botão de energia até aparecer «00 mm» no visor.

Para obter instruções completas e avisos, consulte as instruções de utilização que acompanham o dispositivo.

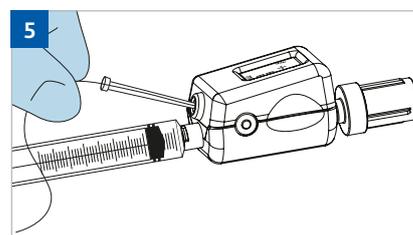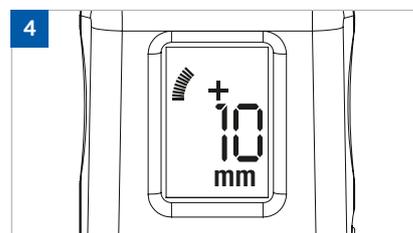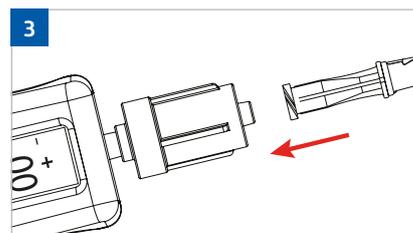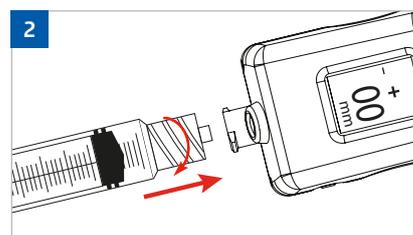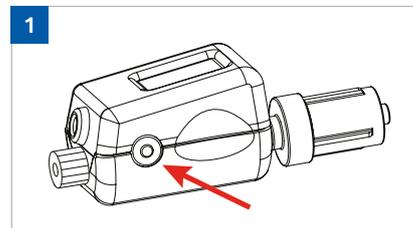

**ALWAYS  
ON.**

Medline International Portugal, Unipessoal, Lda  
Campo Grande, 137, 1º dtº  
Distrito: Lisboa Concelho: Lisboa Freguesia: Campo Grande  
1700 089 Lisboa  
Portugal  
Linha Azul: +351 808 291 921  
Fax: +351 808 291 922  
[www.medline.eu/pt](http://www.medline.eu/pt)  
[pt-atenciaocliente@medline.com](mailto:pt-atenciaocliente@medline.com)