



PRESIÓN INTRAABDOMINAL CUHG1-INT

Activar y calibrar Compass UniversalHg pulsando el botón azul de encendido durante aproximadamente un segundo hasta que se muestre «00 mm» en la pantalla (Figura 1).

Advertencia: Activar y calibrar Compass UniversalHg antes de acoplar accesorios para evitar una presión basal incorrecta.

Extraer el tapón luer proximal (Figura 1). Extraer este tapón antes de la calibración no afecta a la lectura.

Preparar Compass y accesorios antes de acoplarlo al puerto de muestreo del catéter Foley (Figura 2).

Conectar Compass directamente al puerto de muestreo luer lock hembra del catéter Foley (Figura 3). Nota: Se puede conectar un tubo de extensión corto (~ 25 - 51 cm) al puerto de muestreo y la conexión luer lock macho de Compass UniversalHg (Figura 4) para facilitar el posicionamiento del dispositivo Compass en la línea axilar media (a nivel de la vejiga urinaria).

Medición de presión

Confirmar que el Compass UniversalHg está posicionado en la línea axilar media (a nivel de la vejiga urinaria). Para pacientes en una posición inclinada, colocar Compass en la cresta ilíaca en la línea axilar media.

Clampar el tubo que llega al dispositivo de recogida con una pinza deslizante, una pinza de goma o una pinza hemostática. (Figura 3 o 4).

Administrar ~ 20 cc de solución salina para adultos o la cantidad protocolaria del hospital en 10 segundos. La infusión se puede realizar directamente a Compass UniversalHg o a través de una válvula sin aguja colocada en el puerto luer hembra de seguridad de Compass UniversalHg (Figura 3 o 4).

Permitir que el sistema se equilibre (unos pocos segundos) antes de leer la presión.

Verificar la presión intraabdominal mostrada en la pantalla LCD de Compass UniversalHg (Figura 5).






Registrar cualquier solución salina administrada en el historial del paciente para ajustar la producción de orina. Cuando la medición se complete, liberar el tubo de drenaje.

Desconectar la jeringa y el tapón de Compass UniversalHg con un tapón sin salida estéril o una válvula sin aguja si esta i no estaba ya presente. Repetir el proceso para las siguientes mediciones.

Apagado del dispositivo y recalibración

Pulsar el botón tres veces con una secuencia «PULSAR – PULSAR – MANTENER» (es decir, pulsar rápidamente el botón dos veces y después mantener pulsado el botón hasta que el dispositivo se apague). Para recalibrar y poner a cero el dispositivo, abrir el dispositivo y pulsar el botón de encendido hasta que se muestre «00 mm» en la pantalla.

Para ver las instrucciones y las advertencias completas, consultar las instrucciones de uso incluidas en el dispositivo.

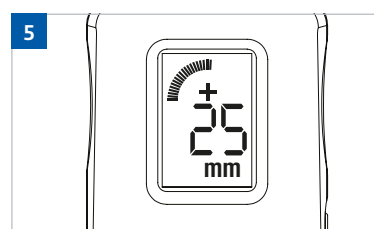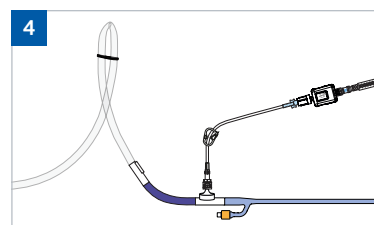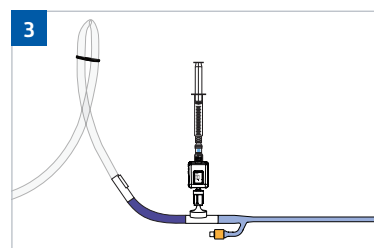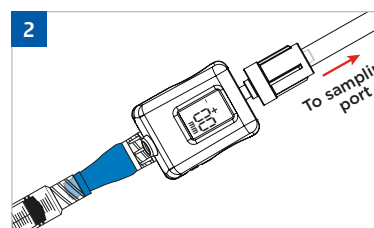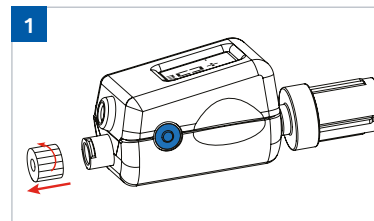

Medline International Iberia S.L.U
Parque Empresarial San Fernando
Avenida de Castilla 2
Edificio Munich, Planta Baja
28830 San Fernando de Henares
Madrid
España
Tfno: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.eu/es
es-atencioncliente@medline.com