



PRESSIONE INTRA-ADDOMINALE CUHG1-INT

Attivare e calibrare l'apparecchio Compass UniversalHg premendo il bottone blu d'accensione per circa un secondo, cioè fino a quando sul display non comparirà la lettura '00 mm' (Figura 1).

Attenzione: Le operazioni di attivazione e calibratura devono essere effettuate prima di collegare lo strumento agli accessori, per non incorrere in una misurazione errata della pressione basale.

Rimuovere il tappo luer prossimale (Figura 1). La rimozione del tappo prima della calibratura non ha alcun effetto sulla misurazione.

Configurare Compass e predisporre gli accessori prima di connettere lo strumento alla porta d'accesso (o sito di prelievo) del catetere di Foley (Figura 2).

Collegare l'apparecchio direttamente alla porta d'accesso distale del catetere di Foley, dotata di raccordo luer lock femmina (Figura 3). Nota: Per facilitare il posizionamento del misuratore Compass lungo la linea medio-ascellare (all'altezza della vescica), (Figura 4) può essere connesso al sito di prelievo del catetere ed al raccordo luer lock maschio dello stesso Compass, un piccolo tubo di estensione (~25 - 51 cm).

Misurazione della Pressione

Verificare che lo strumento sia posizionato lungo la linea medio-ascellare (a livello della vescica). Se il paziente si trova in una posizione inclinata, collocare Compass all'altezza della cresta iliaca della linea medio-ascellare. Clampare il tubo che porta al dispositivo di raccolta con un morsetto, una fascia di gomma o un laccio emostatico. (Figura 3 o 4).

Infondere entro dieci secondi circa 20cc di soluzione fisiologica (dosaggio per adulti, variabile a seconda dei protocolli ospedalieri). Tale operazione può essere portata avanti direttamente attraverso l'apparecchio Compass UniversalHg, oppure tramite una valvola d'accesso senza ago posizionata alla porta con raccordo luer lock femmina dello stesso Compass (Figura 3 o 4).

Prima di effettuare la lettura della pressione, permettere al sistema di tornare in equilibrio (saranno sufficienti alcuni secondi).

Determinare la pressione intra-addominale verificando i relativi valori sul display a cristalli liquidi del Compass UniversalHg (Figura 5).






Ogni quantitativo di soluzione fisiologica infusa deve essere registrato nella cartella del paziente, in modo da correggere i valori della fuoriuscita di urina. Una volta terminata la misurazione, declampare il tubo di drenaggio.

Staccare la siringa ed inserire a chiusura dell'apparecchio Compass UniversalHg un tappo sterile oppure una valvola d'accesso senza ago, qualora quest'ultima non fosse già presente. Ripetere i suddetti processi per le successive misurazioni.

Spegnimento dello Strumento e Ricalibratura

Esercitare una pressione per tre volte sul bottone seguendo la sequenza 'PREMERE - PREMERE - TENERE PREMUTO' (ovverosia premere rapidamente il bottone due volte per poi tenerlo premuto una terza fino allo spegnimento dello strumento). Per ricalibrare ed azzerare l'apparecchio, esporlo alla pressione atmosferica e premere il bottone di accensione fino al comparire della lettura '00 mm' sul display.

Nelle istruzioni allegate all'apparecchio potrete trovare integralmente le avvertenze e le modalità d'utilizzo.

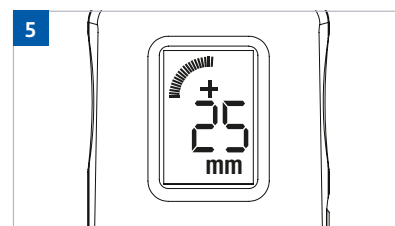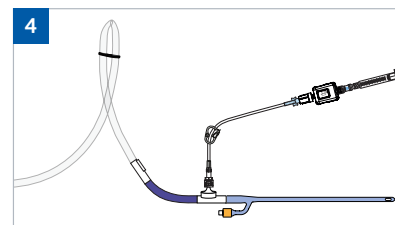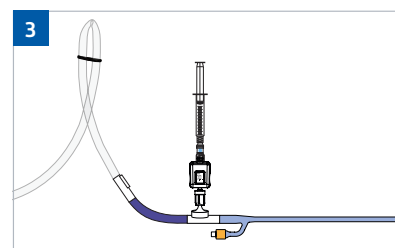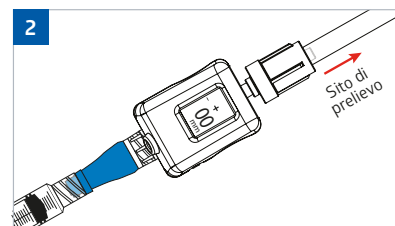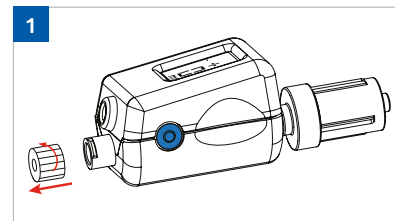

ALWAYS
ON.

Medline International Italy s.r.l. Unipersonale

Piazzale della Resistenza 3
50018 Scandicci
Firenze
Italia

Tel.: +39 55 776 65 11
Fax: +39 55 34 01 12

www.medline.eu/it
it-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl

1 Place de Longemalle
1204 Ginevra
Svizzera

Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100

www.medline.eu/it
ch-customerservice@medline.com