



**CENTURION**  
MEDICAL PRODUCTS

## INTRA ABDOMINALE DRUK CUHG1-INT

Activeer en kalibreer de Compass UniversalHg door ongeveer één seconde op de blauwe knop te drukken tot er '00 mm' in het display staat (Afbeelding 1).

**Waarschuwing:** Activeer en kalibreer de Compass UniversalHg voordat deze aan de accessoires gekoppeld wordt om een incorrecte basisdruk te voorkomen.

Verwijder de proximale luer dop (Afbeelding 1). Deze dop verwijderen voor de kalibratie is niet van invloed op de meting.

Bereid de Compass en accessoires voor op het aansluiten op de female luer lock van de verblijfskatheter (Afbeelding 2).

Koppel Compass direct aan de female luer lock van de verblijfskatheter (Afbeelding 3).  
Notitie: Een korte (~ 25-51cm) verlengslang kan aan de female luer lock van de katheter en de male luer lock aansluiting van de Compass UniversalHg gekoppeld worden (Afbeelding 4) om de Compass op de mid-axillaire lijn te plaatsen (ter hoogte van de blaas).

### Drukmeting

Controleer dat de Compass UniversalHg zich op de mid-axillaire lijn bevindt (ter hoogte van de blaas). Voor patiënten in een hellende positie moet de Compass ter hoogte van de bekkenkam op de mid-axillaire lijn geplaatst worden.

Zet de slang die naar het opvangapparaat gaat vast met een klem, elastiek of haemostat. (Afbeelding 3 of 4).

Dien ~20cc zoutoplossing toe voor volwassenen of de juiste hoeveelheid volgens het ziekenhuisprotocol binnen 10 seconden. Toedienen kan direct door de Compass UniversalHg of door een naaldvrije afsluitdop die aangesloten is op de female luer lock aansluiting van de Compass UniversalHg (Afbeelding 3 of 4).

Geef het systeem tijd (een paar seconden) om een evenwicht te bereiken voordat de druk wordt afgelezen.

Lees de intra abdominale druk af van de meting die op het LCD van de Compass UniversalHg wordt weergegeven (Afbeelding 5).






Noteer de hoeveelheid toegediende zoutoplossing op de patiëntenkaart om de hoeveelheid uitgescheiden urine bij te stellen. Maak de afvoerslang weer los na het uitvoeren van de meting.

Maak de injectiespuit los en sluit de Compass UniversalHg af met een steriele dop of naaldvrije afsluitdop als deze er niet al op zit. Herhaal proces voor volgende metingen.

### Apparaat Uitschakelen en Herkalibratie

Druk drie keer op de knop in de volgorde 'INDRUKKEN - INDRUKKEN - VASTHOUDEN' (dat wil zeggen drie keer achter elkaar op de knop drukken en bij de derde keer de knop vasthouden tot het apparaat uit gaat). Voor herkalibratie van het apparaat op 0, stel het apparaat bloot aan de atmosfeer en druk op de knop tot er '00 mm' in het display staat.

Lees de gebruiksaanwijzing die bij het apparaat geleverd wordt voor volledige instructies en waarschuwingen.

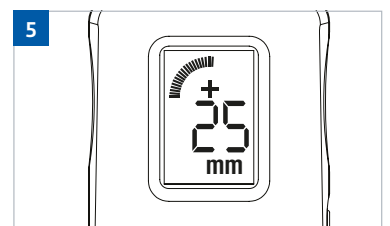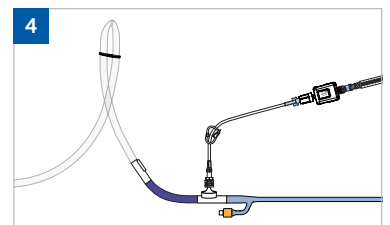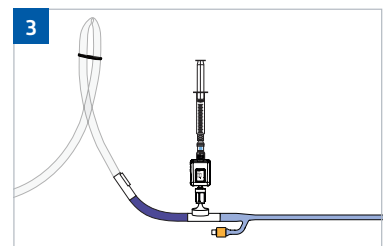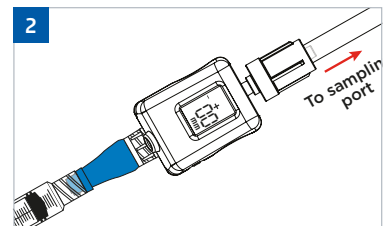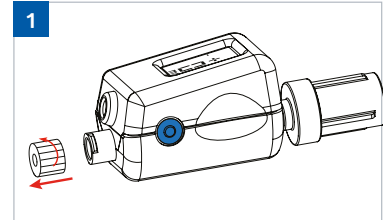

**ALWAYS  
ON.**

**Medline International Netherlands B.V.**

Nieuwe Stationsstraat 10  
6811 KS Arnhem  
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900

Fax: +31 88 00 11 929

[www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)

[nl-customerservice@medline.com](mailto:nl-customerservice@medline.com)

**Medline International Belgium SPRL**

Pegasuslaan 5  
B-1831 Diegem  
België

Tel: +32 2 808 7493

Fax: +32 2 808 7495

[www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)

[be-customerservice@medline.com](mailto:be-customerservice@medline.com)