

PRESIÓN INTRAABDOMINAL

CUHG1-INT

Conecte los adaptadores Luer-Lock a la llave de paso de tres vías (Figura 1).

Retire la tapa en el extremo proximal del dispositivo Compass® y conecte el conector de válvula sin aguja (Figura 2). Luego agregue el tubo de extensión al extremo distal del Compass UniversalHg (Figura 3).

Prepare el Compass UniversalHg antes de conectarlo a la llave de paso de tres vías (Figura 4). Escanee el código QR para obtener instrucciones sobre cómo purgar el Compass UniversalHg.

Conecte el catéter Foley al conector Luer Lock blanco y el medidor de orina al conector Luer-Lock verde (Figura 5).

Asegúrese de que el canal esté libre de sedimentos o bloqueos y que haya suficiente líquido para garantizar la precisión de las mediciones de Compass UniversalHg. Limpie el canal si es necesario conectando una jeringa precargada con solución salina a los conectores de válvula sin aguja (Figura 6).

Ahora tenemos el sistema completo montado y listo para empezar a medir.

Medición de presión

Confirme que el Compass UniversalHg está posicionado en la línea medio axilar (a nivel de la vejiga urinaria).

Active y calibre Compass UniversalHg pulsando el botón azul de encendido durante aproximadamente un segundo hasta que se vea «00 mm» en la pantalla (Figura 3).

Usando la llave de paso de tres vías, abra la conexión entre Compass UniversalHg y el catéter Foley.

Inyecte 20 ml de solución salina a través del conector sin aguja y Compass UniversalHg en la vejiga.

Deje que transcurran entre 30 y 60 segundos para que el músculo detrusor se relaje y la lectura de la presión se estabilice.

Verifique la presión intraabdominal a partir de los datos de presión mostrados en la pantalla LCD del Compass UniversalHg (Figura 7).

Registre cualquier solución salina administrada en el historial del paciente para ajustar la salida de orina. Cuando la medición está completa, libere el flujo de orina reposicionando la llave de paso de tres vías.

Desconecte la jeringa del conector de la válvula sin aguja, dejando el resto de los componentes de monitorización de la presión intraabdominal en posición. Repita el proceso para las siguientes mediciones.

Apagado y recalibración del dispositivo

Pulse el botón tres veces en una secuencia «PULSAR – PULSAR – MANTENER» (es decir, pulsar rápidamente el botón dos veces y después mantener pulsado el botón hasta que el dispositivo se apague). Para recalibrar y poner a cero el dispositivo, abra el dispositivo y pulsar el botón de encendido hasta que se vea «00 mm» en la pantalla.

Para ver las instrucciones y las advertencias completas, consulte las instrucciones de uso incluidas en el dispositivo.

Estos productos son productos sanitarios de clase IIa destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios. Antes del uso, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.

