

PRESSION INTRA-ABDOMINALE

CUHG1-INT

Connectez les adaptateurs Luer-Lock au robinet à trois voies (Figure 1).

Retirez le capuchon à l'extrémité proximale du dispositif Compass® et connectez le connecteur de valve sans aiguille (Figure 2). Ajoutez ensuite le tube d'extension à l'extrémité distale du Compass UniversalHg (Figure 3).

Amorcez le Compass UniversalHg avant de le fixer au robinet à trois voies (Figure 4). Scannez le QR code pour obtenir des instructions sur la façon d'amorcer le Compass UniversalHg.

Fixez le cathéter de Foley au connecteur Luer-Lock blanc et le lecteur d'urine au connecteur Luer-Lock vert (Figure 5).

Assurez-vous que le canal est exempt de sédiments ou de blocages et qu'il y a suffisamment de liquide pour garantir l'exactitude des mesures du Compass UniversalHg. Rincez le canal si nécessaire en connectant une seringue pré-remplie de solution saline aux connecteurs de la valve sans aiguille (Figure 6).

Nous avons maintenant le système complet assemblé et prêt à lire.

Mesure de pression

Confirmez que Compass UniversalHg est positionné sur la voie axillaire moyenne (au niveau de la vessie).

Activez et calibrez Compass UniversalHg en appuyant sur le bouton bleu pendant environ une seconde, jusqu'à ce que l'affichage indique «00 mm» (Figure 3).

À l'aide du robinet à trois voies, ouvrez la connexion entre Compass UniversalHg et le cathéter de Foley.

Injectez 20 ml de solution saline via le connecteur sans aiguille et Compass UniversalHg dans la vessie.

Attendez 30 à 60 secondes pour permettre au muscle détrusor de se détendre et à la pression de se stabiliser.

Vérifiez la pression intra-abdominale à partir des données de pression affichées sur l'écran LCD du Compass UniversalHg (Figure 7).

Enregistrez toute solution saline perfusée sur la fiche du patient pour régler le débit urinaire. Lorsque la mesure est terminée, libérez le débit urinaire en repositionnant le robinet à trois voies.

Débranchez la seringue du connecteur de valve sans aiguille, en laissant les autres composants de surveillance de la pression intra-abdominale en position. Répétez le processus pour des mesures ultérieures.

Mise hors tension et recalibrage de l'appareil

Appuyez trois fois sur le bouton selon la séquence 'POUSSER-POUSSER-MAINTENIR ENFONCÉ' (c'est-à-dire, appuyez rapidement deux fois sur le bouton puis maintenez enfoncé le troisième bouton jusqu'à ce que le dispositif s'éteigne). Pour recalibrer et mettre à zéro le dispositif, ouvrez-le à l'air libre et appuyez sur l'interrupteur jusqu'à ce que l'écran affiche «00 mm».

Pour les instructions complètes et leurs avertissements, veuillez consulter le manuel d'utilisation fourni avec le dispositif.

Ces produits sont des dispositifs médicaux de classe IIa destinés à être utilisés par des professionnels de santé. Avant utilisation, consultez et respectez les instructions et les précautions d'emploi sur l'étiquette correspondante.

Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur pouvant se présenter dans cette brochure.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, États-Unis. ML860_FR 12/2023

