

# PRESSIONE INTRA-ADDOMINALE

## CUHG1-INT

Collegare gli adattatori Luer-Lock al rubinetto a tre vie (Figura 1).

Rimuovere il cappuccio all'estremità prossimale del dispositivo Compass® e collegare il connettore della valvola senza ago (Figura 2). Aggiungere quindi il tubo di estensione all'estremità distale del Compass UniversalHg (Figura 3).

Prendere il Compass UniversalHg prima di collegarlo al rubinetto di arresto a tre vie (Figura 4). Scannerizzare il codice QR per ottenere istruzioni su come utilizzare il trasduttore UniversalHg.

Collegare il catetere Foley al connettore Luer Lock bianco e la sacca urina al connettore Luer-Lock verde (Figura 5).

Assicurarsi che il canale sia privo di sedimenti o ostruzioni e che vi sia una quantità di liquido sufficiente a garantire l'accuratezza delle misurazioni del Compass UniversalHg. Se necessario, sciacquare il canale collegando una siringa pre-riempita con soluzione salina ai connettori della valvola senza ago (Figura 6).

**Ora abbiamo il sistema completo assemblato e pronto per la lettura.**

### Misurazione della Pressione

Verificare che lo strumento sia posizionato lungo la linea medio-ascellare (a livello della vescica).

Attivare e calibrare l'apparecchio premendo il bottone blu di accensione per circa un secondo, cioè fino a quando sul display non comparirà la lettura "00mm" (Figura 3).

Utilizzando il rubinetto a tre vie, aprire il collegamento tra Compass UniversalHg e il catetere di Foley.

Iniettare 20 ml di soluzione fisiologica attraverso il connettore senza ago e Compass UniversalHg nella vescica.

Lasciare trascorrere 30-60 secondi per consentire al muscolo detrusore di rilassarsi e alla pressione di stabilizzarsi.

Verificare la pressione intra-addominale dai dati di pressione visualizzati sullo schermo LCD del Compass UniversalHg (Figura 7).

Ogni quantitativo di soluzione fisiologica infusa deve essere registrato nella cartella del paziente, in modo da correggere i valori della fuoriuscita di urina. Al termine della misurazione, rilasciare il flusso di urina riposizionando il rubinetto a tre vie.

Scollegare la siringa dal connettore della valvola senza ago, lasciando in posizione i restanti componenti del monitoraggio della pressione intra-addominale. Ripetere i suddetti processi per le successive misurazioni.

### Spegnimento e ricalibrazione del dispositivo

Esercitare una pressione per tre volte sul bottone seguendo la sequenza 'PREMERE - PREMERE - TENERE PREMUTO' (ovverosia premere rapidamente il bottone due volte per poi tenerlo premuto una terza fino allo spegnimento dello strumento). Per ricalibrare ed azzerare l'apparecchio, esporlo alla pressione atmosferica e premere il bottone di accensione fino al comparire della lettura '00 mm' sul display.

Nelle istruzioni allegate all'apparecchio potrete trovare integralmente le avvertenze e le modalità d'utilizzo.

Questo prodotto è un dispositivo medico di classe IIa destinato ad essere utilizzato da personale sanitario. Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell'apposita etichetta.

Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori presenti in questo opuscolo.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML860\_IT 12/2023

