



## PRESSÃO INTRA-ABDOMINAL CUHG1-INT

Ativar e calibrar o Compass UniversalHg pressionando o botão de energia azul durante aproximadamente um segundo até aparecer «00 mm» no visor (Figura 1).

**Aviso:** Ativar e calibrar o Compass UniversalHg antes de o ligar aos acessórios para evitar uma pressão inicial de referência incorreta.

Remover a tampa Luer proximal (Figura 1). A remoção desta tampa antes da calibração não afeta a leitura.

Irrigar o Compass e acessórios antes de o ligar à porta de amostragem do cateter de Foley (Figura 2).

Ligar o Compass diretamente na porta de amostragem Luer Lock fêmea do cateter de Foley (Figura 3). Nota: Pode ser ligado um tubo de extensão curto (~ 25-51 cm) à porta de amostragem e ligação Luer Lock macho do Compass UniversalHg (Figura 4) para facilitar o posicionamento do dispositivo Compass na linha axilar média (ao nível de bexiga urinária).

### Medição da pressão

Confirmar se o Compass UniversalHg está posicionado na linha axilar média (ao nível da bexiga urinária). No caso de doentes em posição inclinada, colocar o Compass na crista ilíaca na linha axilar média.

Fixar a tubagem que conduz ao dispositivo de recolha com um clampe corredeiro, elástico ou pinça hemostática. (Figura 3 ou 4).

Infundir ~ 20 cc de soro em adultos ou a quantidade ditada pelo protocolo hospital dentro de 10 segundos. A infusão pode ser feita diretamente no Compass UniversalHg ou através de uma válvula sem agulha posicionada na porta Luer Lock fêmea do Compass UniversalHg (Figura 3 ou 4).

Permitir que o sistema se equilibre (alguns segundos) antes de ler a pressão.

Verificar a pressão intra-abdominal a partir dos dados de pressão indicados no LCD do Compass UniversalHg (Figura 5).






Registar o soro infundido na ficha do doente para ajustar a excreção de urina. Quando a medição estiver concluída, retirar o clampe do tubo de drenagem.

Desconectar a seringa e tapar o Compass UniversalHg com uma tampa estéril sem saída ou válvula sem agulha, se a válvula sem agulha já não estiver presente. Repetir o processo nas medições subsequentes.

### Desligar e recalibrar o dispositivo

Pressionar o botão três vezes numa sequência «PRESSIONAR - PRESSIONAR - MANTER PRESSIONADO» (ou seja, pressionar o botão rapidamente duas vezes seguidas e depois à terceira manter o botão pressionado até o dispositivo se desligar). Para recalibrar e repor o dispositivo a zero, abrir o dispositivo para a atmosfera e pressionar o botão de energia até aparecer «00 mm» no visor.

Para obter instruções completas e avisos, consulte as instruções de utilização que acompanham o dispositivo.

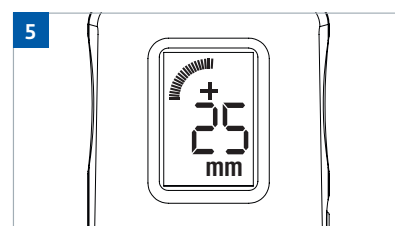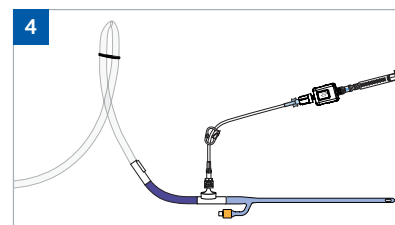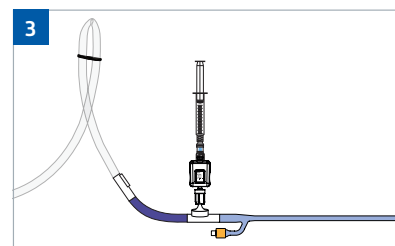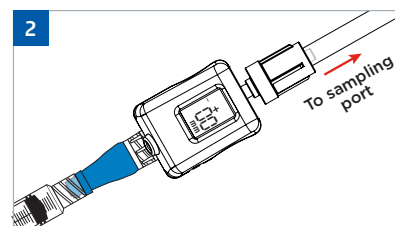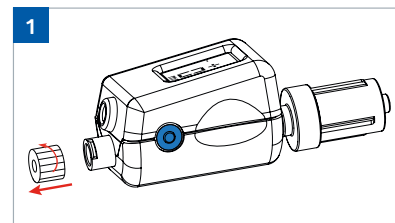

**ALWAYS  
ON.**

**Medline International Portugal Unipessoal LDA**

Avenida do Brasil, 43-3º Direito  
1700-062 Lisboa  
Portugal  
Linha Azul: +351 808 291 921  
Fax: +351 808 291 922

[pt.medline.eu](mailto:pt.medline.eu)  
[pt-atencaocliente@medline.com](mailto:pt-atencaocliente@medline.com)