

PRESSÃO INTRA-ABDOMINAL

CUHG1-INT

Ligue os adaptadores Luer-Lock à torneira de três vias (Figura 1).

Retire a tampa da extremidade proximal do dispositivo Compass® e ligue o conector da válvula sem agulha (Figura 2). Em seguida, adicione o tubo de extensão à extremidade distal do Compass UniversalHg (Figura 3).

Preparar o Compass UniversalHg antes de o ligar à torneira de três vias (Figura 4). Digitalize o código QR para obter instruções sobre como iniciar o Compass UniversalHg.

Ligar o cateter de Foley ao conector Luer Lock branco e o medidor de urina ao conector Luer-Lock verde (Figura 5).

Certifique-se de que o canal está livre de quaisquer sedimentos ou bloqueios e de que existe fluido suficiente para garantir a exatidão das medições do Compass UniversalHg. Enxaguar o canal, se necessário, ligando uma seringa previamente cheia com solução salina aos conectores da válvula sem agulha (Figura 6).

Temos agora o sistema completo montado e pronto a ler.

Medição da pressão

Confirmar se o Compass UniversalHg está posicionado na linha axilar média (ao nível da bexiga urinária).

Ativar e calibrar o Compass UniversalHg pressionando o botão de energia azul durante aproximadamente um segundo até aparecer «00 mm» no visor (Figura 3).

Utilizando a torneira de três vias, abra a ligação entre o Compass UniversalHg e o cateter de Foley.

Injetar 20 ml de soro fisiológico na bexiga através do conector sem agulha e do Compass UniversalHg.

Deixar passar 30 a 60 segundos para que o músculo detrusor relaxe e a leitura da pressão estabilize.

Verificar a pressão intra-abdominal a partir dos dados de pressão apresentados no ecrã LCD do Compass UniversalHg (Figura 7).

Registar o soro infundido na ficha do doente para ajustar a excreção de urina. Quando o a medição estiver concluída, libertar o fluxo de urina reposicionando a torneira de três vias.

Desligar a seringa do conector da válvula sem agulha, deixando os restantes componentes de monitorização da pressão intra-abdominal em posição. Repetir o processo nas medições subsequentes.

Desligamento e recalibração do dispositivo

Pressionar o botão três vezes numa sequência «PRESSIONAR - PRESSIONAR - MANTER PRESSIONADO» (ou seja, pressionar o botão rapidamente duas vezes seguidas e depois à terceira manter o botão pressionado até o dispositivo se desligar). Para recalibrar e repor o dispositivo a zero, abrir o dispositivo para a atmosfera e pressionar o botão de energia até aparecer «00 mm» no visor.

Para obter instruções completas e avisos, consulte as instruções de utilização que acompanham o dispositivo.

Estes produtos são dispositivos médicos classe IIa destinados a ser utilizados por profissionais de saúde. Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.

