



**SISTEMI DI PROTEZIONE STERILI  
PER I SITI D'INCISIONE CHIRURGICA.**

**Dermadine® e Dermadrape® Film Incisione**

Aumenta la sterilità per un maggiore sicurezza procedurale



# FILM INCISIONE DERMADINE®

La preparazione preoperatoria della cute prevede procedure di pulizia, detersione e disinfezione per ridurre al minimo la presenza di batteri superficiali. Queste procedure determinano una riduzione della carica batterica ma non la completa eliminazione poiché i batteri possono annidarsi e sopravvivere all'interno di microscopiche pieghe cutanee. In tutte le procedure chirurgiche che richiedono asepsi totale per lungo tempo è consigliato usare i teli incisione Dermadine che offrono oltre alla sterilità, un'azione antimicrobica ad ampio spettro contro molti microorganismi.

Il film adesivo contiene sostanze iodofore a lento rilascio cutaneo durante la durata della procedura chirurgica, indicato per interventi breve-medio-lungo termine.


Dermadine dovrebbe essere usato come step finale nella preparazione del campo chirurgico.

## Lunga Durata

La presenza di sostanze iodofore nella miscela acrilica adesiva, garantisce un lento rilascio e costante presenza di iodio sulle cute per periodi anche superiori le 24 ore. Tali caratteristiche rendono il prodotto adatto per procedure con lunghi tempi chirurgici.



MISURAZIONE DELL'ATTIVITA' ANTIBATTERICA (SECONDO ISO 22196:2011)

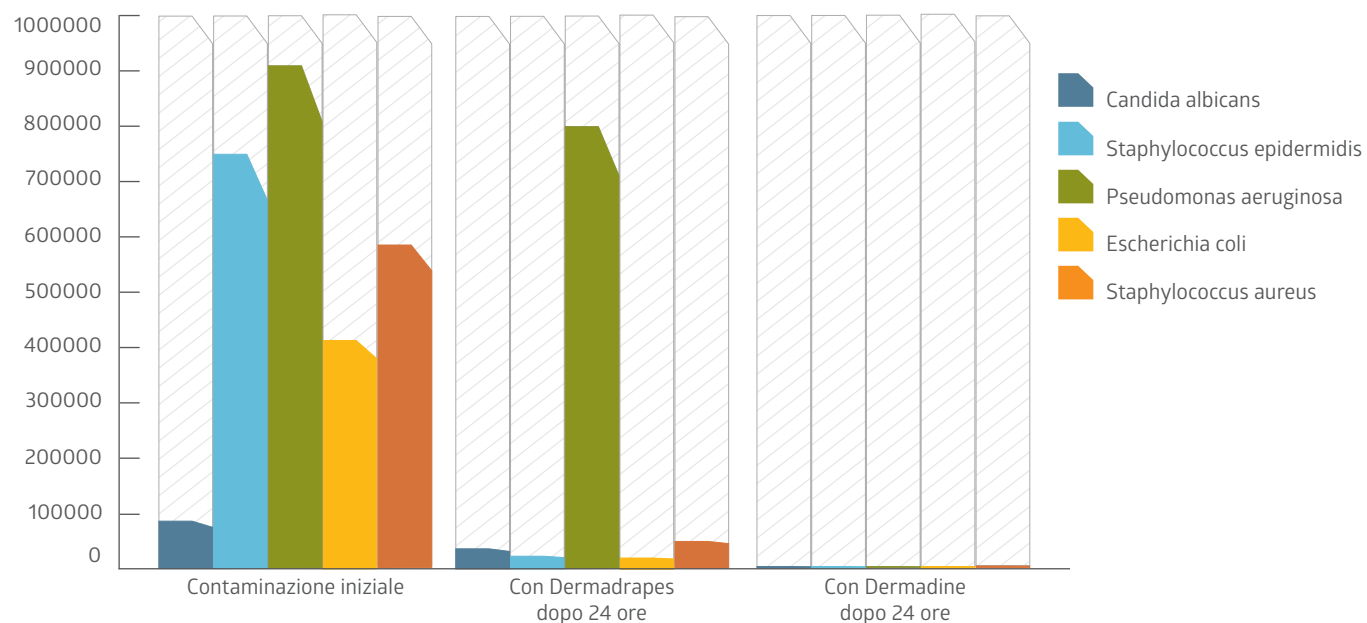


## Azione Rapida

L'applicazione DERMADINE mostra una forte attività antimicrobica. Entro 30 min dall'applicazione di Dermadine, c'è una riduzione rapida e significativa riduzione del biodurden-carica batterica che gradualmente si stabilizza nel tempo. Dermadine assicura asepsi costante sulla cute del paziente per lunghi periodi di tempo.


## Confortevole Ed Avvolgente

Naturalmente elastico e ultra sottile garantisce una perfetta vestibilità delle conformazioni anatomiche, strutturali e giunzionali. Film Dermadine si adatta alle grandi deformazioni dei muscoli (anche con uso di retrattori autostici) senza ledere o diminuire la propria adesività.

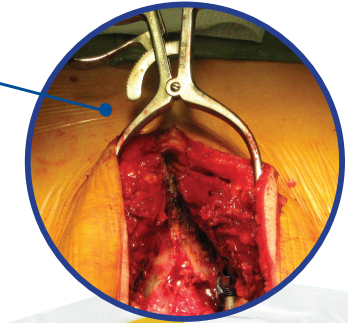

## Traspirante, Idrorepellente ed Impermeabile

Dermadine combina capacità di repellenza al sangue-liquidi e buona traspirabilità al vapore acqueo per prevenire formazioni e raccolta di liquidi che potrebbero ridurre l'adesività durante lunghi interventi. La traspirabilità del film d'incisione garantisce completa impermeabilità ai microrganismi.

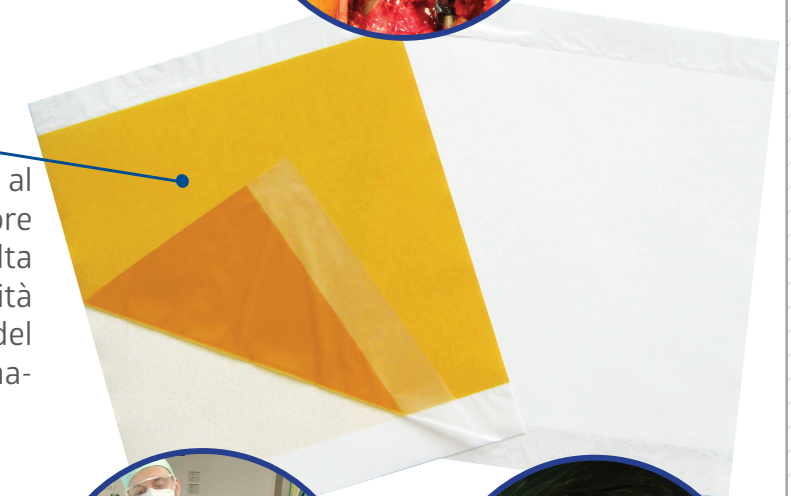

## Resistente Ed Antiriflesso

Oltre alla sua eccellente resistenza allo strappo e alla rottura, Dermadine consente un'incisione chirurgica semplice con qualsiasi tipo di lama da bisturi e indirettamente protegge la cute più sensibile e sottile da ulteriori lacerazioni.

Il film ha una gradazione antiriflesso ottimale per la visibilità del sito d'incisione sotto le luci scialitiche.



## Adesivita' Con Agenti Antimicrobici

L'adesivo skin friendly biocompatibile consente una buona adesività a tutti i tipi di pelle e superfici specialmente sui margini della ferita, senza causare alcuna reazione cutanea\*. Il complesso reticolare poliaccrilico presente nell'adesivo Dermadine contiene un complesso iodoforo.

Il tensioattivo J-carrie veicola lo iodio e consente il lento rilascio cutaneo. L'adesivo acrilico è atraumatico nella fase di rimozione dalla cute anche i pazienti anziani e non lascia alcun residuo dopo il distacco.

## Conservazione

Conservare il prodotto in luogo fresco ad asciutto, a temperatura ambiente al riparo dalla luce e dall'umidità in stanze ventilate e non a contatto con il pavimento. Evitare lo stoccaggio in luoghi con temperature estreme.

## Sterilizzazione

Raggi gamma

## Smaltimento

Dopo l'uso, il dispositivo medico deve essere smaltito come rifiuto speciale.

## Certificazione Dispositivo Medico:

DERMADRAPE®: Classe IIa  
CND code: T02010101  
DERMADINE® Classe IIa  
CND code: T02010102





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







## Confezionamento

- Confezionamento singolo in busta pelabile
- Etichette rintracciabilità removibili per apposizione cartella clinica paziente
- Disponibile in piccoli dispenser box
- Disponibile per la produzione di set customizzati SPT MEDLINE



Tiasset Loc Botriolo  
S.P. Km 5,100  
52020 Castellfranco di Sopra  
(AR) Italia

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CE 0373 Istituto Superiore di Sanità

DERMADINE® ITEM NUMBER	DIMENSIONI (CM)	UNITA/ DIS- PENSER	UNITA/ CARTONE	DERMADRAPE® ITEM NUMBER*
42020 	20x20cm Adh. 15x20cm	20	120 (6x20)	32020 
NA	35x25cm Adh. 30x25cm	20	120 (6x20)	33525 
44040 	40x40cm Adh. 34x40cm	15	90 (6x15)	34040 
NA	50x48cm Adh. 44x48cm	15	90 (6x15)	35050 
47045 	70x45cm Adh. 60x45cm	10	90 (6x15)	37045 
48060 	80x60cm Adh. 60x60cm	10	60 (6x10)	38060 
48080 	80x80cm Adh. 70x80cm	10	60 (6x10)	38080 

\*Medline offre anche gamma Dermadrape, line completa di film incisione trasparenti senza iodopovidone

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti, prego contattare il venditore di zona o visita il sito [www.medline.eu/it](http://www.medline.eu/it).



Medline International Italy s.r.l. Unipersonale  
Piazzale della Resistenza, 3  
50018 Scandicci  
Firenze - Italia

Tel: + 39 55 776 65 11  
Fax: + 39 55 34 01 12  
[www.medline.eu/it](http://www.medline.eu/it)  
[it-customerservice@medline.com](mailto:it-customerservice@medline.com)

Medline International Switzerland Sàrl  
A-One Business Center  
Z.A. la pièce N°1 - A5  
1180 Rolle  
Svizzera  
Tel. +41 848 244 433  
Fax. +41 848 244 100  
[www.medline.eu/it](http://www.medline.eu/it)  
[ch-customerservice@medline.com](mailto:ch-customerservice@medline.com)