



Über 80 %

aller Perforationen von OP-Handschuhen bleiben unentdeckt.¹

Je länger die Handschuhe getragen werden, desto höher ist das Risiko einer Perforation.²

Handschuh-Perforationen können zur Übertragung von infektiösen Krankheitserregern führen.

Doppelbehandschuhung:



1. Ziehen Sie einen dunklen Unterziehhandschuh an.

2. Ziehen Sie einen hellen äußeren Handschuh darüber an, um einen deutlichen Kontrast zu schaffen.

3. Perforationen in Ihrem äußeren Handschuh können Sie auf diese Weise leicht erkennen.



**SensiCare® PI Green
MSG92xx**

- Aus Isolex-Polyisopren, 100 % latexfrei
- Außenbeschichtung zur besseren Haftung der beiden Handschuhe miteinander
- Aloe-Vera-Innenbeschichtung
- Fingerspitzendicke: 0,21 mm



**DermAssure™ Green
MSG65xx**

- Aus Neopren, 100 % latexfrei
- Außenbeschichtung zur besseren Haftung der beiden Handschuhe miteinander
- Ohne Beschleuniger, um das Risiko einer allergischen Kontaktdermatitis zu verringern
- Fingerspitzendicke: 0,19 mm



**Signature Latex Green
MSG55xx**

- Aus Latex
- Außenbeschichtung zur besseren Haftung der beiden Handschuhe miteinander
- Aloe-Vera-Innenbeschichtung
- Fingerspitzendicke: 0,19 mm



Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: www.medline.eu/de.

1. Thomas, S., Agarwala, M., Mehtab, G. Intraoperative glove perforation—single versus double gloving in protection against skin contamination. Post Graduate Medical Journal. 2001; 77:458-460. Verfügbar unter: <http://pmj.bmj.com/content/77/909/458.full>. Abgerufen am 18. Dezember 2015. 2. Partecke, Lars Ivo, Anna-Maria Gört, Inga Langner, Bernd Jäger, Ojan Assadian, Claus-Dieter Heidecke, Axel Kramer und Nils-Olaf Hübner. 'Incidence of Microperforation for Surgical Gloves Depends on Duration of Wear.' Infection Control and Hospital Epidemiology 30.5 (2009): 409-14.

Diese Handschuhe sind sterile Medizinprodukte der Klasse IIa und für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal vorgesehen. Bitte lesen Sie vor Gebrauch die Anweisungen und Sicherheitshinweise auf der Verpackung.



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France



Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in diesem Dokument zu korrigieren.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML977_DE 07/2023