

EasyBath®: Waschen ohne Wasser

Für eine verbesserte Infektionsprävention



**Waschen ohne
Wasser leicht
gemacht**



Herausforderungen der traditionellen Wäsche

98 %

der für die Patientenhygiene verwendeten Waschschüsseln sind mit potenziell krankheitserregenden Bakterien kontaminiert, darunter *S. aureus*, VRE, MRSA, *P. aeruginosa*, *C. albicans* und *E. coli*.¹

Das Eindämmen von Infektionsrisiken bei schwerkranken Patienten ist entscheidend für ihre Genesung. Das Waschen von Patienten ist eine der wichtigsten pflegerischen Aufgaben, die dazu beitragen, die Lebensqualität und Versorgung der Patienten zu verbessern. Neuere Untersuchungen zeigen jedoch, dass dies auch eine der Ursachen für Kontamination auf Intensivstationen sein kann.²

Zudem haben Waschschüssel, Seife und Wasser noch weitere Nachteile, als das höhere Risiko für die Ausbreitung von Infektionen. Viele Seifen greifen die Haut an, können sie austrocknen und anfälliger machen.



EasyBath®: Die bevorzugte Methode

Zur Anwendung ohne Waschschüssel, Handtuch und Wasser.

Viele Gründe sprechen dafür, dass das Waschen direkt am Bett mit EasyBath® mehr Vorteile hat als herkömmliches Waschen mit Waschschüsseln, Wasser und Seife.



Einheitliche, konsistente Patientenpflege mit Waschhandschuhen und -tüchern

Waschen in der Patientenpflege

EasyBath®

EasyBath® ermöglicht eine komfortable, gleichbleibende und klinisch effektive Patientenwäsche direkt am Krankenbett in Form von feuchten Waschtüchern oder Waschhandschuhen. Diese reinigen und pflegen zuverlässig die Haut und spenden Feuchtigkeit, ohne die Haut zu gefährden.



Waschtücher

Artikelnummer	Produktbeschreibung	Verpackungseinheit
MSCE095309A	Standard, ohne Duftstoff	8 Tücher/Packung, 30 Packungen/Karton

Waschhandschuhe



Artikelnummer	Produktbeschreibung	Verpackungseinheit
WM80300	Standard, mit Duftstoff	8 Waschhandschuhe/Packung, 30 Packungen/Karton
WM80301	Standard, ohne Duftstoff	8 Waschhandschuhe/Packung, 30 Packungen/Karton
WM50303	Standard, ohne Duftstoff	5 Waschhandschuhe/Packung, 24 Packungen/Karton



EasyBath® Plus

EasyBath® Plus, die antiseptischen Waschhandschuhe und -tücher wurden speziell für antiseptische Patientenbäder entwickelt, da sie mit einer 2-prozentigen Chlorhexidindigluconatlösung (CHG) imprägniert sind. Die imprägnierten Waschhandschuhe und -tücher können vor und nach chirurgischen Eingriffen verwendet werden, selbst bei Risikopatienten, da das 2-prozentige CHG als Hautdesinfektionsmittel wirkt und zur Reduzierung der mikrobiellen Belastung der Haut beiträgt.



Waschtücher

Artikelnummer	Produktbeschreibung	Verpackungseinheit
CHGC800	Standard; imprägniert mit CHG	8 Tücher/Packung; 30 Packungen/Karton



Waschhandschuhe

Artikelnummer	Produktbeschreibung	Verpackungseinheit
CHGWM800	Standard; imprägniert mit CHG	8 Handschuhe/Packung; 24 Packungen/Karton

Haarpflege

Shampoo-Hauben

Haarewaschen im Bett ist eine Herausforderung. Mit den parfümierten oder parfümfreien EasyBath® Shampoo-Hauben wird die Haarwäsche für alle Beteiligten zu einer Freude - ohne Verschütten von Wasser, ohne Schaum und Abspülen, ohne den Aufwand mit Waschschüsseln oder der aufwändigen Positionierung der Patienten. EasyBath® Shampoo-Hauben reinigen das Haar und enthalten Conditioner, so dass das Haar gepflegt und frisierfertig ist. Außerdem ermöglichen sie den Pflegekräften, bei den Patienten eine wohltuende, entspannende und sanfte Kopfhautmassage durchzuführen.



Artikelnummer	Produktbeschreibung	Verpackungseinheit
SC230	mit Duftstoff	1 Shampoo-Haube/Packung; 30 Packungen/Karton
SC231	ohne Duftstoff	1 Shampoo-Haube/Packung; 30 Packungen/Karton



Patientenkomfort

Wärmeschrank

Für das höchste Maß an Patientenkomfort wärmt der EasyBath® Wärmeschrank die EasyBath® Packungen auf eine gleichmäßige und angenehme Temperatur auf. Kontrollleuchten zeigen an, wenn die ideale Temperatur erreicht ist. Der Wärmeschrank hilft außerdem den Bestand zu organisieren: gemäß dem FIFO- (first in - first out) Prinzip wird angezeigt, welche Packung als nächstes zu entnehmen ist.



Artikelnummer	Anzahl der Fächer	Größe	Gewicht
MSCEWARMER14S	14	33 x 46 x 34 cm	10,6 kg
MSCEWARMER28S	28	56 x 46 x 34 cm	12,9 kg

Pflegende Reinigung

AloeTouch®

Der Flip 'N Seal-Verschluss der AloeTouch-Packungen reduziert den Plastikanteil im Deckel um 71 % und hält die Tücher wochenlang frisch. Im Gegensatz zu herkömmlichen Klebefolien-Verschlüssen lässt sich der Flip 'N Seal-Verschluss einfach mit einer Hand öffnen und bleibt bis zum Schließen geöffnet.

AloeTouch® ist das Produkt der Wahl für alle, die mehr von einem feuchten Reinigungstuch erwarten. Die AloeTouch Feuchttücher enthalten eine sanfte, sulfatfreie Reinigungslösung und eine Pflegelösung mit hohem Aloe-Vera-Anteil. Zudem werden bei der Reinigung mit diesen Feuchttüchern voraussichtlich weniger Tücher als zuvor benötigt.



Artikelnummer	Produktbeschreibung	Verpackungseinheit
MSCE263654	AloeTouch® Feuchttücher, parfümiert , 20 x 30 cm	48 Tücher/Packung, 12 Packungen/Karton

ReadyFlush®

Um den EDANA-Richtlinien für die Entsorgung in der Toilette zu entsprechen, mussten unsere ReadyFlush-Tücher sieben Tests bestehen, die ihre Eigenschaften hinsichtlich Auflösung, biologischem Abbau sowie Durchlaufen von Abwasser- und Klärsystemen bestätigten. Das bedeutet, dass sie sich beim Herunterspülen genau wie Toilettenpapier auflösen und somit keine Abwasserrohre verstopfen. Sie sind zu 100 % biologisch abbaubar und unbedenklich für Abwasser- und Kläranlagen.

ReadyFlush® wird am Bett oder im Badezimmer verwendet. Es ist stark genug für eine kraftvolle Reinigung, dank seiner milden Inhaltsstoffe gleichzeitig auch sanft zur Haut.



Artikelnummer	Produktbeschreibung	Verpackungseinheit
PW840	Feuchttücher, in der Toilette zu entsorgen, parfümiert , 20 x 25 cm	48 Tücher/Packung, 12 Packungen/Karton

Setzen Sie neue Standards mit den Medline Produkten.

3 einfache Schritte:

ALOE TOUCH® PRODUCT TEST
EVALUATION FORM

Name: _____ Date: _____

Which products are you currently using to wash your patients?

HOW SATISFIED ARE YOU WITH THE TESTED PRODUCT?

	Excellent	Very Good	Good	Not Good	Not Satisfied
Availability	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Performance and removal from (bedding)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Material and structure of the product	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Performance	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ease of use	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Time expenditure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cleaning of patient	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Thermal satisfaction	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Overall impression	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

If you have other comments, please share them in the comments field below:

Comments: _____

Signature: _____

Your opinion is important to us! Thank you for taking the time to test and evaluate our products.

Anwendungshinweise:
EasyBath® Shampoo-Haube

Komfortable und schnelle Haarpflege

- Handtuch über die Schultern des Patienten legen. Hände waschen und, falls erforderlich, Untersuchungshandschuhe anziehen.
- Wenn gewünscht, EasyBath® Shampoo-Haube 15 Sekunden in der Mikrowelle (max. 1250 Watt) oder im Wasserschrank von Medline erhitzen.
- Haube auf den Kopf des Patienten setzen. Wenn der Patient längeres Haar hat, muss das Haar zunächst auf dem Kopf zusammengepresst werden, bevor die Haube aufgesetzt wird.
- Das Haar des Patienten durch die Haube hindurch massieren. 1 bis 2 Minuten für kurzes Haar, 2 bis 3 Minuten für längeres Haar.
- Haube abnehmen und in einem entsprechenden Abfallbehälter entsorgen. Kein Abgeben der Haare erforderlich.
- Bei Bedarf das Haar des Patienten mit einem Handtuch abtrocknen und anschließend kämmen oder bürsten.

HAARWELFENGESETZ
"Wer wusch?"
"Wo wusch?"
"Wann wusch?"
"Wie wusch?"
"Was wusch?"
"Wohin wusch?"
"Wem wusch?"
"Waschen Sie sich!"

EASYBATH®
WASCHEN IN DER
PATIENTENPFLEGE

1 Ermittlung Ihrer Bedürfnisse gemeinsam mit den klinischen Anwendungsberatern von Medline.

2 Schulung medizinischer Pflegekräfte.

3 Information für Patienten und deren Angehörige.

Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: www.medline.eu/de.



Medline International Germany GmbH
Medline-Straße 1-3
47533 Kleve
Deutschland

Tel.: +49 2821 7510-0
Fax: +49 2821 7510-7802

www.medline.eu/de
de-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associés SA
1204 Genf
Schweiz

Tel: +41 848 244 433
Fax: +41 848 244 100

www.medline.eu/ch
ch-customerservice@medline.com

Medline Austria GmbH
c/o CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld, Hlawati
Parkring 2
1010 Wien
Österreich

Tel: +43 800 201 878
Fax: +43 800 201 879

www.medline.eu/at
at-customerservice@medline.com

FOLLOW US

¹D. Johnson, L. Lineweaver, L. M. Maze: Patients' bath basins as potential sources of infection: a multicenter sampling study. American Journal of Critical Care. 2009. 18; (1)31-38.

²B. K. Decker, T. N. Palmore: The role of water in healthcare-associated infections. Current Opinion in Infectious Diseases. 2013;26(4):345-351. doi:10.1097/QCO.0b013e3283630adf

³J. Kron-Chalupa, T. Benda, B. Williams: The basinless bath: A study on skin dryness and patient satisfaction. Iowa City Veterans Affairs Medical Center. 2006.