

L'igiene del paziente con prodotti senza risciacquo

Migliora la prevenzione delle infezioni



**Semplifichiamo
il lavaggio del
paziente**



I rischi correlati al bagno tradizionale

98%

delle bacinelle utilizzate per l'igiene dei pazienti sono contaminate da batteri potenzialmente patogeni, tra cui *S. aureus*, VRE, MRSA, *P. aeruginosa*, *C. albicans* ed *E. coli*.¹

Il controllo dei rischi di infezione nei pazienti critici è fondamentale per la loro guarigione. Il bagno del paziente è una delle attività infermieristiche chiave che aiuta a migliorare la qualità della vita e l'assistenza al paziente. Tuttavia, recenti ricerche dimostrano che può anche essere una delle principali fonti di contaminazione nelle unità di terapia intensiva (ICU).²

Bacinelle, acqua e sapone possono fare molto di più che aumentare la probabilità di diffusione di infezioni. Molti saponi possono essere aggressivi sulla pelle e alla fine possono lasciarla secca e vulnerabile a ulteriori danni.



EasyBath® fornisce un'esperienza d'igiene migliore

Non utilizzare più l'acqua

Ci sono molte ragioni per cui fare il bagno a pazienti allettati utilizzando EasyBath è migliore rispetto al tradizionale bagno con lavabo, acqua e sapone.



Cura costante da un panno all'altro, da paziente a paziente e da operatore ad operatore!

Bagno

Perché scegliere EasyBath

EasyBath fornisce un comodo kit per bagno da comodino, coerente e clinicamente efficace ed è disponibile come panni imbevuti o guanti da lavaggio. Aiuta a mantenere la pelle sana perché la sua formulazione senza risciacquo pulisce e idrata senza danneggiare la cute.



Salviette

Codice prodotto	Descrizione	Confezionamento
MSCE095309A	Standard, non profumato	8 salviette/conf; 30 conf/cartone

Panno guanto



Codice prodotto	Descrizione	Confezionamento
WM80300	Standard; profumato	8 guanti/conf; 30 conf/cartone
WM80301	Standard, non profumato	8 guanti/conf; 30 conf/cartone




Cura dei capelli

Cuffie shampoo

Lavare i capelli a letto è sicuramente un'azione difficoltosa. Me eliminando bacchette, acqua, schiuma e risciacquo le cuffie shampoo EasyBath, disponibili in versione profumata e senza profumazione, rendono lo shampoo più semplice ed efficace. Le cuffie shampoo EasyBath lavano e ammorbidiscono i capelli, rendendoli puliti e pronti per la piega. Permettono inoltre al personale infermieristico di fornire un massaggio morbido e rilassante al cuoio capelluto.



Codice prodotto	Descrizione	Confezionamento
SC230	Standard; profumato	1 cuffia/conf; 30 conf/cartone
SC231	Standard, non profumato	1 cuffia/conf; 30 conf/cartone

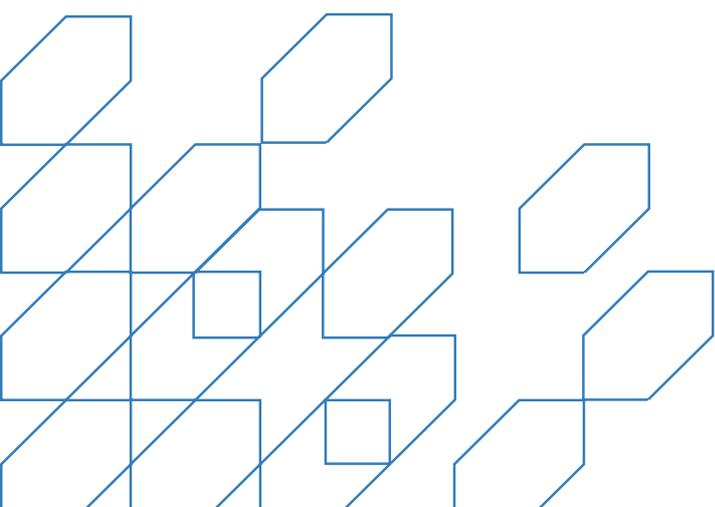

Comfort del paziente

Riscaldatore intelligente

Per il massimo comfort del paziente l'esclusivo Riscaldatore Intelligente EasyBath mantiene le confezioni di EasyBath a una temperatura uniforme e sicura per un piacevole bagno caldo. Gli indicatori luminosi si accendono quando la temperatura ideale è stata raggiunta. Aiuta anche a tenere traccia dell'inventario indicando la confezione più idonea da prelevare, mantenendo una rotazione dello stock FIFO (First In-First Out).



Codice prodotto

Scomparti

Misura

Peso

MSCEWARMER14S

14

33 x 46 x 34 cm

10.6 kg

MSCEWARMER28S

28

56 x 46 x 34 cm

12.9 kg

Igiene personale

AloeTouch®

La chiusura Flip 'N Seal™ sulle confezioni AloeTouch riduce la quantità di plastica nel coperchio del 71%, mantenendo le salviette fresche per settimane. A differenza delle tradizionali chiusure in pellicola adesiva, Flip 'N Seal si apre facilmente con una mano e rimane aperto finché non lo chiudi.

AloeTouch è la scelta per le persone che vogliono qualcosa in più dalla loro salvietta detergente. Questo è possibile perché le salviette AloeTouch sono più robuste ed impregnate con una soluzione detergente, delicata e priva di solfati, e con agenti emollienti per la cute ricchi di aloe. Scoprirai di poter utilizzare meno salviette per svolgere il tuo lavoro.



Codice prodotto	Descrizione	Confezionamento
MSCE263654	Salviette in spunlace; profumate , 20 x 30 cm	48 salviette/conf; 12 conf/cartone

ReadyFlush®

Per essere etichettate “Biodegradabili” da EDANA,* le salviette ReadyFlush devono essere sottoposte a sette diversi test che valutano la loro capacità di disintegrarsi, di dissolversi lasciando puliti i sistemi settici e le linee fognarie. Ciò significa che si rompono proprio come la carta igienica quando vengono smaltiti nel water senza intasamenti. Sono biodegradabili al 100% e sicuri per fognature e sistemi settici.

ReadyFlush può essere usato anche a casa accanto al letto o in bagno. È abbastanza resistente per una pulizia vigorosa, mentre la sua formula delicata è lenitiva sulla pelle.



Codice prodotto	Descrizione	Confezionamento
PW840	Salviette dispersibili; profumate , 20 x 25 cm	48 salviette/conf; 12 conf/cartone

*EDANA: Associazione Europea Monouso e Tessuto Non tessuti

Standardizza il tuo protocollo di igiene ora!

3 semplici passaggi:

HOW SATISFIED ARE YOU WITH THE TESTED PRODUCT?	Excellent	Very Good	Acceptable	Unsatisfactory	N/A
Packaging and removal from packaging	<input type="checkbox"/>				
Material and structure of the product	<input type="checkbox"/>				
Performance	<input type="checkbox"/>				
Ease of use	<input type="checkbox"/>				
Time expenditure	<input type="checkbox"/>				
Cleaning of patient	<input type="checkbox"/>				
Patient satisfaction	<input type="checkbox"/>				
Overall impression	<input type="checkbox"/>				

**Modality di utilizzo:
EasyBath® cuffia shampoo**
Cura dei capelli veloce e conveniente

- Preparare un asciugamano, lavare le mani ed indossare i guanti da sterile, se richiesti.
- Riscaldare la cuffia shampoo EasyBath per 15 secondi nel forno a microonde (750 watt massimo) o nell'hotdogger Warner di Medline. Aprire la confezione e prelevare la cuffia.
- Posizionare la cuffia sulla testa del paziente. Se il paziente ha capelli lunghi, bisogna raccoglierti sul capo prima di indossare la cuffia.
- Massaggiare i capelli del paziente attraverso la cuffia finché non appaiono bagnati: da 1 a 2 minuti per capelli corti e da 2 a 3 minuti per capelli lunghi.
- Remuovere la cuffia e smaltire nell'apposito contenitore dei rifiuti. Non necessita di risciacquo.
- Utilizzare un asciugamano per asciugare i capelli del paziente e se necessario pettinare.

EASYBATH
DETERSIONE SENZA
L'UTILIZZO DI ACQUA

1 Valutazione delle esigenze del cliente con lo staff clinico di Medline

2 Formazione per gli infermieri

3 Formazione rivolta ai pazienti ed alle loro famiglie

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, potete contattare il vostro account manager o visitare il nostro sito: www.medline.eu/it



Medline International Italy s.r.l. Unipersonale
Piazzale della Resistenza 3
50018 Scandicci
Firenze
Italia
Tel.: +39 55 776 65 11
www.medline.eu/it
it-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associes SA
1204 Ginevra
Svizzera
Tel. +41 848 244 433

www.medline.eu/ch
ch-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

¹Johnson D, Lineweaver L, Maze LM. Patients' bath basins as potential sources of infection: a multicenter sampling study. American Journal of Critical Care. 2009. 18(1):31-38.
²Decker BK, Palmore TN. The role of water in healthcare-associated infections. Current Opinion in Infectious Diseases. 2013;26(4):345-351. doi:10.1097/QCO.0b013e3283630adf
³Kron-Chalupa J, Benda T, Williams B. The basinless bath: A study on skin dryness and patient satisfaction. Iowa City Veterans Affairs Medical Center. 2006.