

# L'igiene del paziente con prodotti senza risciacquo

Migliora la prevenzione delle infezioni



**Semplifichiamo  
il lavaggio del  
paziente**



# I rischi correlati all'igiene tradizionale

98%

delle bacinelle utilizzate per l'igiene dei pazienti sono contaminate da batteri potenzialmente patogeni, tra cui *S. aureus*, VRE, MRSA, *P. aeruginosa*, *C. albicans* ed *E. coli*.<sup>1</sup>

Il controllo dei rischi di infezione nei pazienti critici è fondamentale per la loro guarigione. L'igiene del paziente è una delle attività infermieristiche chiave che aiuta a migliorare la qualità della vita e l'assistenza al paziente. Tuttavia, recenti ricerche dimostrano che può anche essere una delle principali fonti di contaminazione nelle unità di terapia intensiva (ICU).<sup>2</sup>

Oltre ad aumentare la probabilità di diffusione di infezioni, molti saponi possono essere aggressivi sulla pelle e possono lasciarla secca e vulnerabile a ulteriori danni.



# EasyBath® fornisce un'esperienza d'igiene migliore

## Non utilizzare più l'acqua

Ci sono molte ragioni per cui fare il bagno a pazienti allettati utilizzando EasyBath è preferibile al tradizionale bagno con lacinelle, acqua e sapone.



**Cura costante da un panno all'altro, da paziente a paziente e da operatore a operatore!**

# Igiene

## Perché scegliere EasyBath

EasyBath fornisce un comodo kit per l'igiene da comodino, coerente e clinicamente efficace ed è disponibile come panni imbevuti o guanti da lavaggio. Aiuta a mantenere la pelle sana perché la sua formulazione senza risciacquo pulisce e idrata senza danneggiare la cute.



### Salviette

Codice prodotto	Descrizione	Confezionamento
MSCE095309A	Standard, non profumato	8 salviette/conf; 30 conf/cartone

### Panno guanto



Codice prodotto	Descrizione	Confezionamento
WM80300	Standard; profumato	8 guanti/conf; 30 conf/cartone
WM80301	Standard, non profumato	8 guanti/conf; 30 conf/cartone
WM50303	Standard, non profumato	5 guanti/conf; 24 conf/cartone




# Cura dei capelli

## Cuffie shampoo

Lavare i capelli a letto è sicuramente un'azione difficoltosa. Me eliminando bacinelle, acqua, schiuma e risciacquo le cuffie shampoo EasyBath, disponibili in versione profumata e senza profumazione, rendono lo shampoo più semplice ed efficace. Le cuffie shampoo EasyBath lavano e ammorbidiscono i capelli, rendendoli puliti e pronti per la piega. Permettono inoltre al personale infermieristico di fornire un massaggio morbido e rilassante al cuoio capelluto.



Codice prodotto	Descrizione	Confezionamento
SC230	Standard; <b>profumato</b>	1 cuffia/conf; 30 conf/cartone
SC231	Standard, <b>non profumato</b>	1 cuffia/conf; 30 conf/cartone

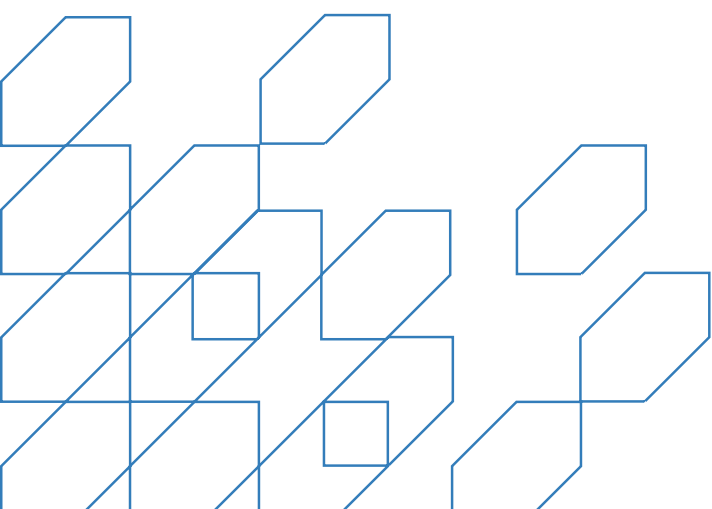

# Comfort del paziente

## Riscaldatore intelligente

Per il massimo comfort del paziente l'esclusivo Riscaldatore Intelligente EasyBath mantiene le confezioni di EasyBath a una temperatura uniforme e sicura per una piacevole igiene calda. Gli indicatori luminosi si accendono quando la temperatura ideale è stata raggiunta. Aiuta anche a tenere traccia dell'inventario indicando la confezione più idonea da prelevare, mantenendo una rotazione dello stock FIFO (First In-First Out).



### Codice prodotto

### Scomparti

### Misura

### Peso

MSCEWARMER14S

14

33 x 46 x 34 cm

10.6 kg

MSCEWARMER28S

28

56 x 46 x 34 cm

12.9 kg

# Igiene personale

## AloeTouch®

La chiusura Flip 'N Seal™ sulle confezioni AloeTouch riduce la quantità di plastica nel coperchio del 71%, mantenendo le salviette fresche per settimane. A differenza delle tradizionali chiusure in pellicola adesiva, Flip 'N Seal si apre facilmente con una mano e rimane aperto finché non lo chiudi.

AloeTouch è la scelta per le persone che vogliono qualcosa in più dalla loro salvietta detergente. Questo è possibile perché le salviette AloeTouch sono più robuste ed impregnate con una soluzione detergente, delicata e priva di solfati, e con agenti emollienti per la cute ricchi di aloe. Scoprirai di poter utilizzare meno salviette per svolgere il tuo lavoro.



### Codice prodotto

### Descrizione

### Confezionamento

MSCE263654

Salviette in spunlace; **profumate**, 20 x 30 cm

48 salviette/conf; 12 conf/cartone

## ReadyFlush®

Per essere etichettate “Biodegradabili” da EDANA,\* le salviette ReadyFlush devono essere sottoposte a sette diversi test che valutano la loro capacità di biodegradarsi, di dissolversi lasciando puliti i sistemi settici e le linee fognarie. Ciò significa che si sfaldano proprio come la carta igienica quando vengono smaltiti nel water senza intasamenti. Sono biodegradabili al 100% e sicuri per fognature e sistemi settici.

ReadyFlush può essere usato anche a casa accanto al letto o in bagno. È abbastanza resistente per una pulizia vigorosa, mentre la sua formula delicata è lenitiva sulla pelle.



### Codice prodotto

### Descrizione

### Confezionamento

PW840


Salviette dispersibili; **profumate**, 20 x 25 cm

48 salviette/conf; 12 conf/cartone

\*EDANA: Associazione Europea Monouso e Tessuto Non tessuti

# Standardizza il tuo protocollo di igiene ora!

## 3 semplici passaggi:

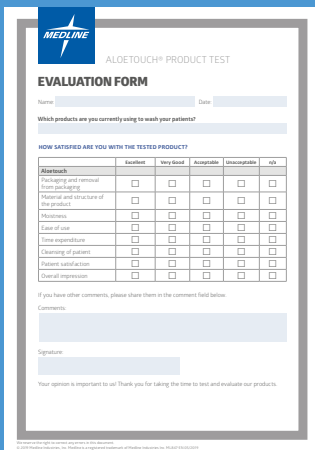

**ALGOETOUCH® PRODUCT TEST**  
**EVALUATION FORM**

Name: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

Which products are you currently using to wash your patients? \_\_\_\_\_

HOW SATISFIED ARE YOU WITH THE TESTED PRODUCT?

Attribute	Excellent	Very Good	Acceptable	Unsatisfactory	N/A
Prepared and removed from packaging	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Material and structure of the product	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Measurement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ease of use	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Time expenditure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cleaning of patient	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Patients satisfaction	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Overall impression	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

If you have other comments, please share them in the comment field below:  
Comments: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_

Your opinion is important to us! Thank you for taking the time to test and evaluate our products.



**Modalità di utilizzo:  
EasyBath® cuffa shampoo**  
Cura dei capelli veloce e conveniente

- Preparare un disaccagnato, lavare le mani ed indossare i guanti da esame, se richiesti.
- Riscaldare la cuffa shampoo EasyBath per 15 secondi nel forno a microonde (750 watt massimo) o nell'hotdogger Warner di Medline. Aprire la confezione e prelevare la cuffa.
- Posizionare la cuffa sulla testa del paziente. Se il paziente ha capelli lunghi, bisogna raccoglierti sul capo prima di indossare la cuffa.
- Massaggiare i capelli del paziente attraverso la cuffa finché non appaiono bagnati da 1 a 2 minuti per capelli corti e da 2 a 3 minuti per capelli lunghi.
- Rimuovere la cuffa e smaltire nell'apposito contenitore dei rifiuti. Non necessita di risciacquo.
- Utilizzare un disaccagnato per asciugare i capelli del paziente e se necessario pettinare.

**Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, potete contattare il vostro account manager o visitare il nostro sito: [www.medline.eu/it](http://www.medline.eu/it)**



**EASYBATH**  
DETERSIONE SENZA  
L'UTILIZZO DI ACQUA

**1** Valutazione delle esigenze del cliente con lo staff clinico di Medline

**2** Formazione per gli infermieri

**3** Formazione rivolta ai pazienti ed alle loro famiglie

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, potete contattare il vostro account manager o visitare il nostro sito: [www.medline.eu/it](http://www.medline.eu/it)



**Medline International Italy s.r.l. Unipersonale**  
Piazzale della Resistenza 3  
50018 Scandicci  
Firenze  
Italia  
Tel.: +39 55 776 65 11  
[www.medline.eu/it](http://www.medline.eu/it)  
[it-customerservice@medline.com](mailto:it-customerservice@medline.com)

**Medline International Switzerland Sàrl**  
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associes SA  
1204 Ginevra  
Svizzera  
Tel. +41 848 244 433

[www.medline.eu/ch](http://www.medline.eu/ch)  
[ch-customerservice@medline.com](mailto:ch-customerservice@medline.com)

FOLLOW US  

<sup>1</sup>Johnson D, Lineweaver L, Maze LM. Patients' bath basins as potential sources of infection: a multicenter sampling study. American Journal of Critical Care. 2009. 18(1):31-38.  
<sup>2</sup>Decker BK, Palmore TN. The role of water in healthcare-associated infections. Current Opinion in Infectious Diseases. 2013;26(4):345-351. doi:10.1097/QCO.0b013e3283630adf  
<sup>3</sup>Kron-Chalupa J, Benda T, Williams B. The basinless bath: A study on skin dryness and patient satisfaction. Iowa City Vetrans Affairs Medical Center. 2006.

Questo prodotto è un dispositivo medico di classe I non sterile destinato ad essere utilizzato da personale sanitario. Prima dell'uso, consultare le istruzioni e le avvertenze riportate in etichetta.

Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori che potrebbero essersi verificati.  
©2023 Medline Industries, LP. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, LP. ML516\_IT 11/2023