
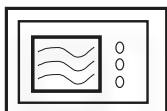


ANWENDUNGSHINWEISE FÜR EIN KOMFORTABLES WASCHERLEBNIS: EASYBATH® WASCHHANDSCHUHE

Nehmen Sie die 5er Packung EasyBath® Waschhandschuhe aus dem Medline Wärmeschrank oder wärmen Sie diese (verschlossen) in der Mikrowelle 30 bis 60 Sekunden lang auf (750 Watt).

Verwenden Sie jeweils einen EasyBath® Waschhandschuh, um einen der folgenden fünf Körperbereiche zu reinigen:

- 1 Gesicht, Hals und Brust
- 2 Arme und Achseln
- 3 Genitalbereich
- 4 Beine
- 5 Rücken und Gesäß

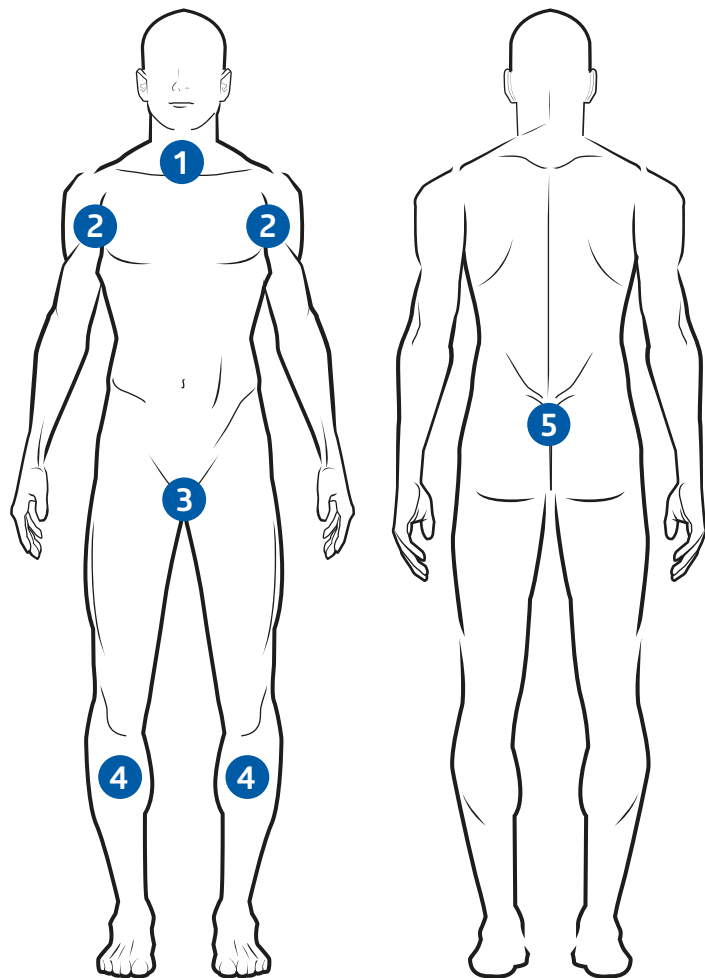

Mikrowelleneignung
750 Watt
30-60 Sekunden



Bitte entsorgen Sie die
EasyBath® Waschhandschuhe
nicht in der Toilette.

Für weitere Informationen zu EasyBath® können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: www.medline.eu/de.