





# MODE D'EMPLOI: EASYBATH® SYSTÈME DE TOILETTE PAR PAQUET DE 5

Pour chauffer les gants de toilette, placer le paquet EasyBath® fermé dans un micro-onde (750W) pendant 30 sec à 1 minute, ou dans le Warmer EasyBath® Medline.

Utiliser 1 gant de toilette EasyBath® pour nettoyer chacune des 5 parties du corps:

- 1 Tête, cou et torse
- 2 Bras et aisselles
- 3 Périnée
- 4 Jambes
- 5 Dos et fesses

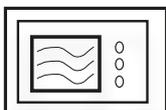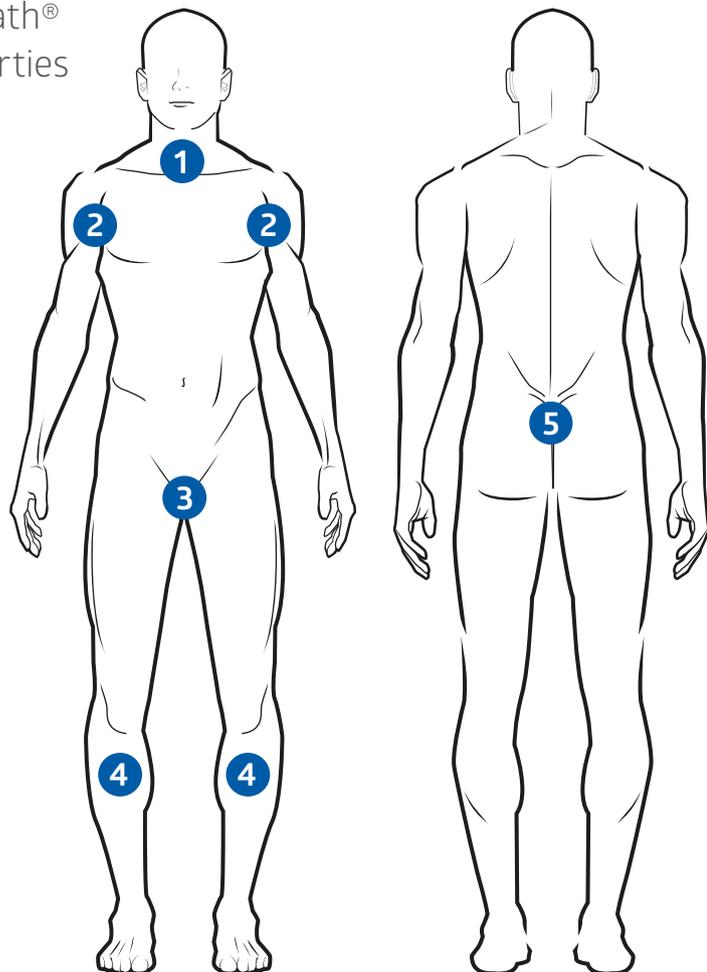

Micro-ondes  
750 Watts  
30 - 60 sec



Ne pas jeter les gants de toilette EasyBath® dans les toilettes

Pour plus d'informations sur la gamme EasyBath®, contactez votre responsable commercial ou visitez-nous sur [www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)