
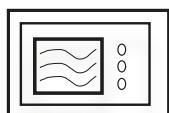


MODALITA' D'USO: EASYBATH® PACCHETTO DA 5 PER UN'IGIENE PERSONALE COMPLETA

Riscaldare il pacchetto di EasyBath® (chiuso) nell'Intelligent Warmer di Medline o in un forno a microonde (impostato su 750 Watts) per 30 sec - 1 min.

Utilizzare un panno guanto Easybath® per l'igiene di ognuna delle seguenti 5 aree del corpo (1 pacchetto da 5 panni guanto).

- 1 Viso, collo e torace
- 2 Braccia e ascelle
- 3 Inguine
- 4 Gambe
- 5 Schiena / Zona Sacrale

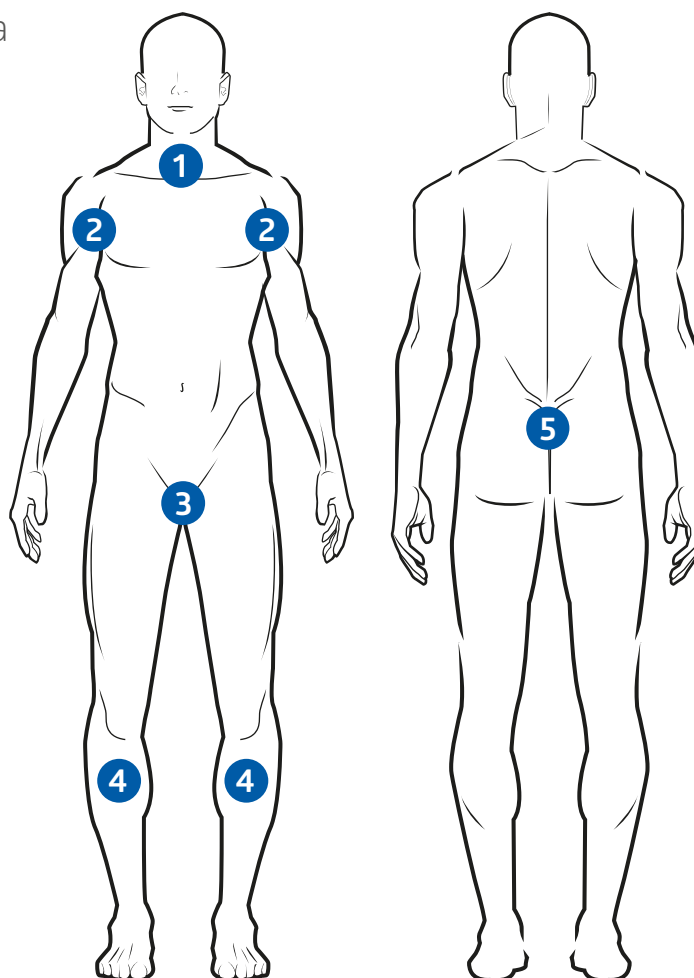

Forno a microonde
750 Watts
30 sec - 1 min



Non Gettare EasyBath®
panno nel WC

Per saperne di più di EasyBath®, contatta il rappresentante di vendita o visita il nostro sito www.medline.eu/it