



EASYBATH



EMBALAGEM DE 5 MANÁPULAS PARA BANHO

MODO DE UTILIZAÇÃO:

Aqueça a embalagem EasyBath (fechada) no Aquecedor Inteligente Medline ou no micro-ondas durante 30-60 segundos (750 W de potência).

Use a manácula de banho EasyBath para limpar cada uma das seguintes cinco zonas corporais:

- 1 Face, pescoço e torác
- 2 Braços e axilas
- 3 Períneo
- 4 Pernas
- 5 Costas/nádegas.

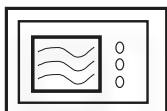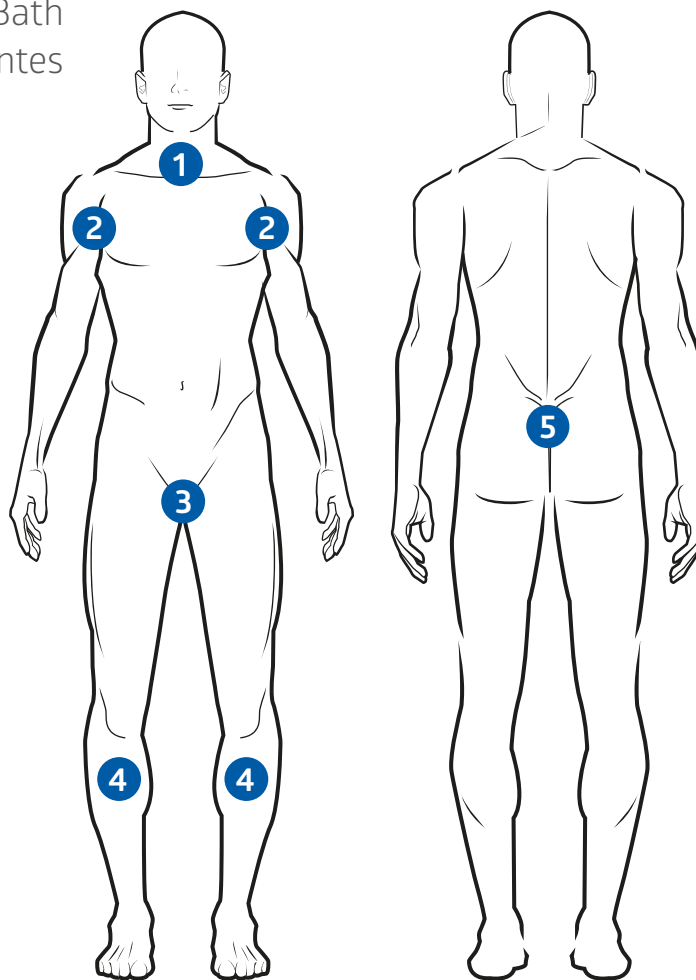

Próprio para o
750 Watts
30 - 60 segundos



Não deitar as manáculas
de banho EasyBath na
sanita.

Para mais informações sobre a EasyBath, entre em contacto com o seu gestor de conta Medline ou consulte o nosso website em: www.medline.eu/pt