

EasyBath®

5-Pack de lingettes de nursing




Mode d'emploi :

Réchauffez la poche EasyBath (fermée) dans le chauffe-bain intelligent Medline EasyBath.

Utilisez un gant de toilette EasyBath pour nettoyer chacune des cinq zones du corps suivantes :

- 1 visage, cou et torse
- 2 Aisselles et bras
- 3 périnée
- 4 jambes
- 5 fessier.

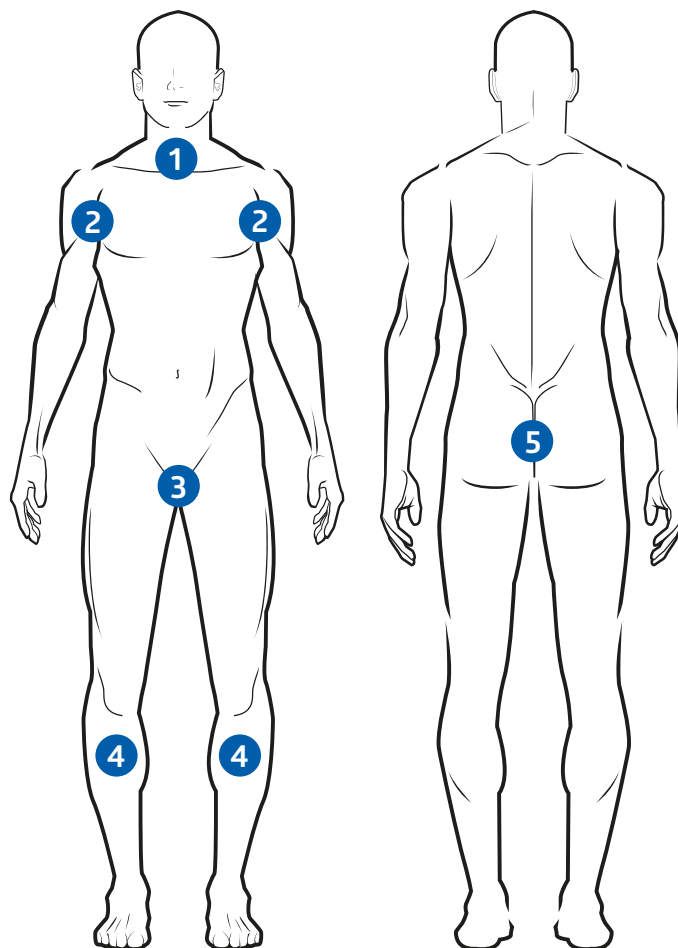

WM50303

Pour plus d'informations sur ce produit, merci de contacter votre responsable commercial Medline ou consultez notre site Web : www.medline.eu/fr



Ne pas jeter les gants de toilette EasyBath dans les toilettes.