

EasyBath® 5 salviette per il bagno del paziente




Come utilizzarle:

Riscaldare la confezione di EasyBath (chiusa) nell'Intelligence Warmer di Medline o nel microonde (impostazione 750 watt).

Utilizzare un guanto o una salvietta EasyBath per detergere ciascuna delle seguenti cinque aree del corpo:

- 1 Viso, collo e petto
- 2 Braccia e ascelle
- 3 Perineo
- 4 Gambe
- 5 Natiche.

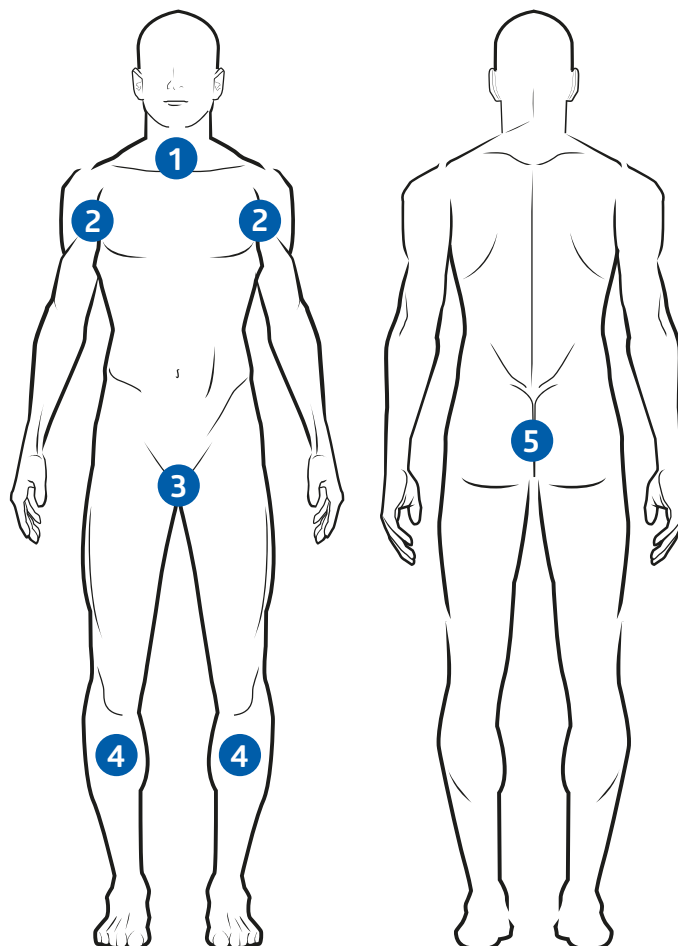

WM50303



Non gettare nel water le salviette o il panno guanto EasyBath.

Per ulteriori informazioni su EasyBath, contattate il vostro account manager Medline o visitate il sito: www.medline.eu/it.

*Per le istruzioni esatte sul riscaldamento, consultare le etichette e le istruzioni per l'uso corrispondenti.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, LP. ML199_IT 09/2023