

# EASYBATH

## SISTEMA DE HIGIENE CORPORAL COMPLETA DE UN SOLO ENVASE DE 8 TOALLITAS



### Cómo realizar una higiene completa sin aclarado:

Caliente el envase de toallitas EasyBath® en el Calentador Inteligente de Medline o durante 30-60 segundos en un microondas (750 W máximo).

Utilice una toallita EasyBath por cada una de las 8 zonas detalladas a continuación:



- 1 Cara, Cuello y Pecho
- 2 Brazo izquierdo/Axila
- 3 Brazo derecho/Axila
- 4 Zona Perineal
- 5 Pierna izquierda
- 6 Pierna derecha
- 7 Espalda
- 8 Nalgas

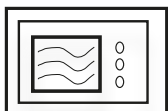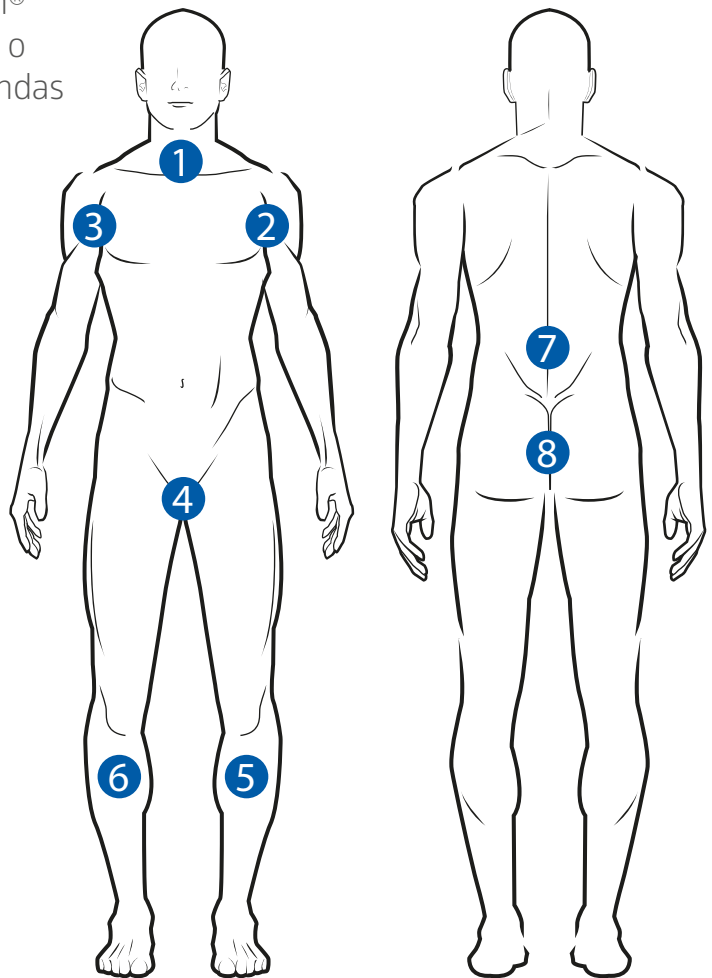

Posibilidad de calentar en microondas  
750 Watts  
30 - 45 sec



No tire las toallitas EasyBath en el inodoro

Para conocer más sobre EasyBath®, contacte con su delegado, o visite nuestra página web [www.medline.eu/es](http://www.medline.eu/es)