



EASYBATH®

SYSTÈME DE TOILETTE PAR PAQUET DE 8



MODE D'EMPLOI:

Les gants de toilette EasyBath® peuvent être utilisés chauds ou à température ambiante. Pour chauffer les gants de toilette, placer le paquet EasyBath® fermé dans:

- un micro-onde (750W) pendant 30 sec à 1 minute, ou
- dans le Warmer EasyBath® Medline

Utiliser 1 gant de toilette EasyBath® pour nettoyer chacune des 8 parties du corps:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1 Tête, cou et torse | 5 Jambe gauche |
| 2 Bras gauche/aisselles | 6 Jambe droite |
| 3 Bras droit/aisselles | 7 Dos |
| 4 Périnée | 8 Fesses |

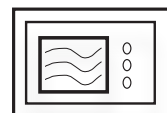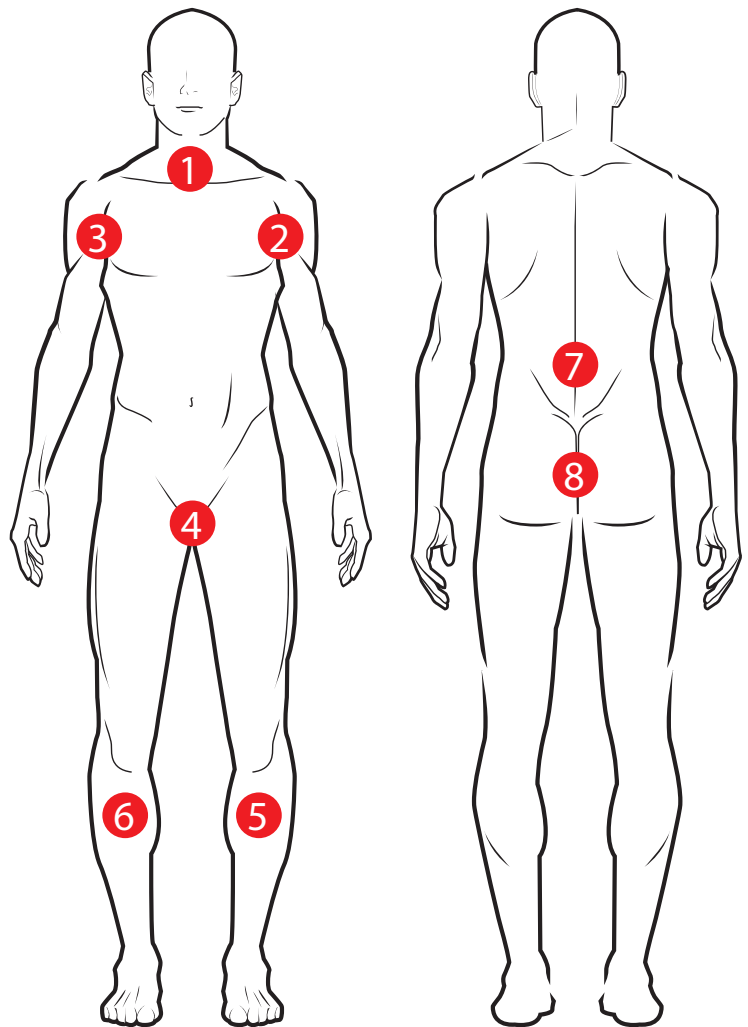

MICRO-ONDES
750 Watts
30 - 45 sec



Ne pas jeter les gants de toilette EasyBath® dans les toilettes

Pour plus d'informations sur la gamme EasyBath®, contactez votre responsable commercial ou visitez-nous sur www.medline.com/fr