

# EASYBATH

PACCHETTO DA 8 PANNI GUANTO PER UN'IGIENE PERSONALE COMPLETA



## MODALITA' D'USO:

Riscaldare il pacchetto di EasyBath® (chiuso) nell' Intelligent Warmer di Medline o in un forno a microonde (impostato su 750 Watts).

Utilizzare un panno guanto Easybath® per l'igiene di ognuna delle seguenti 8 aree del corpo (1 pacchetto da 8 panni guanto).



- 1 Viso, collo e torace
- 2 Braccio sinistro e ascella
- 3 Braccio destro e ascella
- 4 Inguine destro e sinistro
- 5 Gamba sinistra
- 6 Gamba destra
- 7 Schiena
- 8 Zona sacrale.

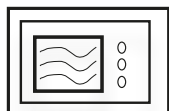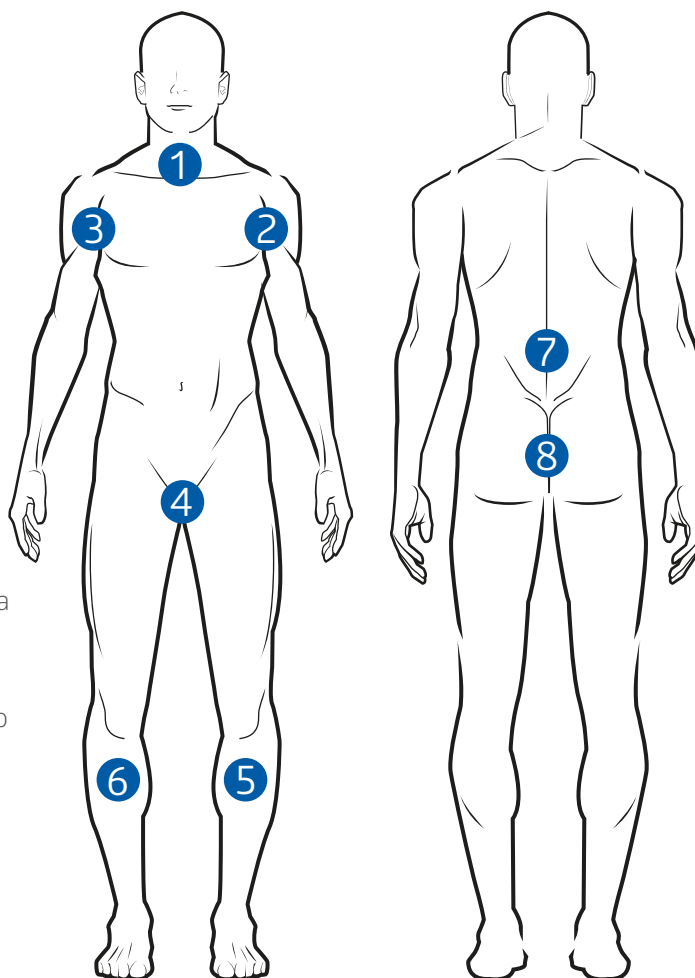

Forno a microonde  
750 watts  
30 seconds



Non Gettare EasyBath®  
panno nel WC

Per saperne di più di EasyBath®, contatta il rappresentante di vendita o visita il nostro sito [www.medline.com/it](http://www.medline.com/it)