

EasyBath® 8-salviette per il bagno del paziente




Come utilizzarle:

Riscaldare la confezione di EasyBath (chiusa) nel riscaldatore intelligente Medline o nel microonde (impostazione 750 watt).

Utilizzare un guanto o una salvietta EasyBath per detergere ciascuna delle seguenti otto aree del corpo:

- 1 Viso, collo e petto
- 2 Braccio sinistro/ascella
- 3 Braccio destro/ascella
- 4 Perineo
- 5 Gamba sinistra
- 6 Gamba destra
- 7 Schiena
- 8 Natiche.

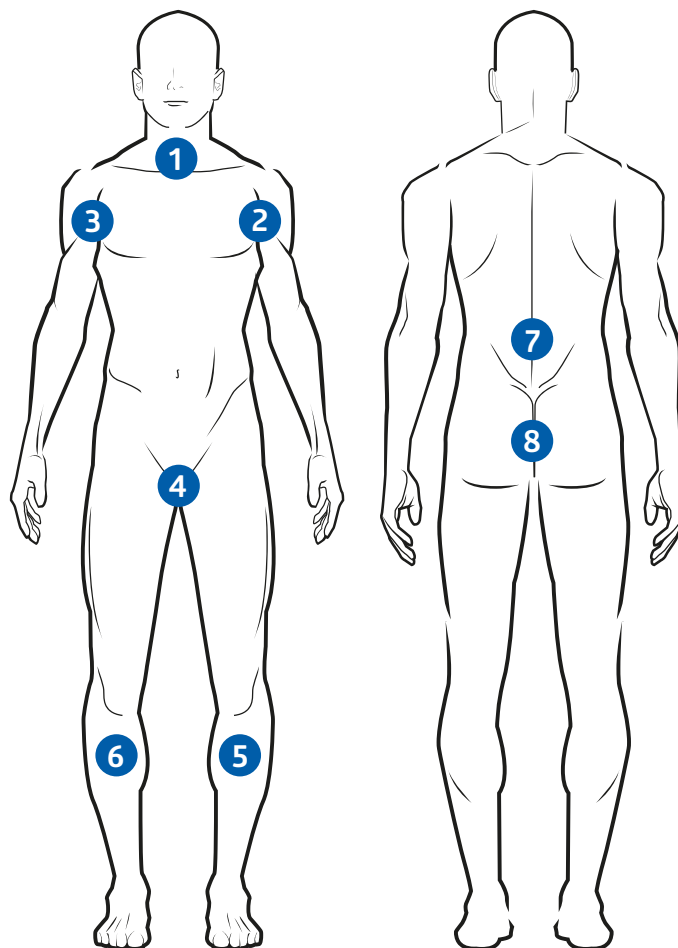

WM80300/WM80301



MSCE095309A



Riscaldabile nel microonde 750 watt 30 secondi*



Non gettare nel water le salviette o il panno guanto EasyBath.

Per ulteriori informazioni su EasyBath, contattate il vostro account manager Medline o visitate il sito: www.medline.eu/it.