

# EasyBath® 8-Pack Wassysteem




## Gebruiksaanwijzing:

Verwarm de EasyBath verpakking (gesloten) in de Medline Intelligente Verwarmer of in de magnetron (750 watt).

Gebruik een EasyBath washandje of wasdoekje voor elk van de volgende acht lichaamsdelen:

- 1 Gezicht, nek en borst
- 2 Linkerarm / linkeroksel
- 3 Rechterarm / rechteroksel
- 4 Perineum
- 5 Linkerbeen
- 6 Rechterbeen
- 7 Rug
- 8 Billen.

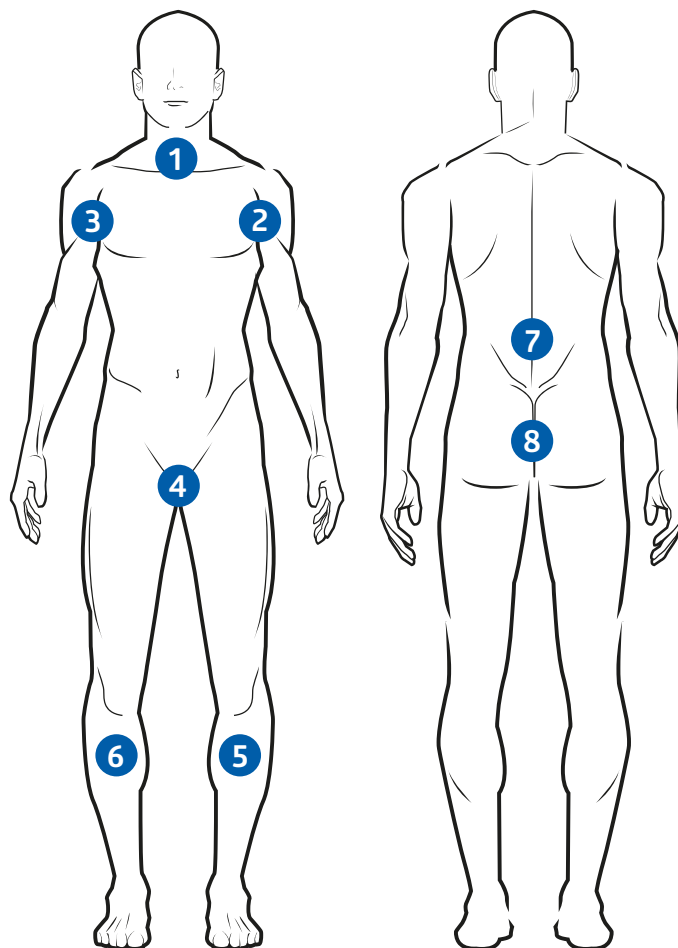


WM80300/WM80301



MSCE095309A

**Voor meer informatie** over EasyBath, neem contact op met uw Medline vertegenwoordiger of bezoek ons op [www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl).

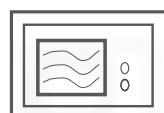

Geschikt voor in de magnetron 750 watt 30 seconden\*



Spoel EasyBath washandjes of doekjes niet door het toilet.

\*Voor exacte verwarmingsinstructies, zie de desbetreffende labels en gebruiksaanwijzing.