



Anwendungshinweise: EasyBath® Shampoo-Haube

Komfortable und schnelle Haarpflege

- 1 Handtuch über die Schultern des Patienten legen, Hände waschen und, falls erforderlich, Untersuchungshandschuhe anziehen.
- 2 Wenn gewünscht, EasyBath® Shampoo-Haube 15 Sekunden in der Mikrowelle (max. 1250 Watt) oder im Wärmeschrank von Medline erwärmen.
- 3 Haube auf den Kopf des Patienten setzen. Wenn der Patient längeres Haar hat, muss das Haar zunächst auf dem Kopf zusammengenommen werden, bevor die Haube aufgesetzt wird.
- 4 Das Haar des Patienten durch die Haube hindurch massieren: 1 bis 2 Minuten für kürzeres Haar, 2 bis 3 Minuten für längeres Haar.
- 5 Haube abnehmen und in einem entsprechenden Abfallbehälter entsorgen. Kein Abspülen der Haare erforderlich.
- 6 Bei Bedarf das Haar des Patienten mit einem Handtuch abtrocknen und anschließend kämmen oder bürsten.



MIKROWELLENGEEIGNET

Max. 1250 Watt
15 Sekunden



SC230: mit Duftstoffen



SC231: ohne Duftstoffe



Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: www.medline.eu/de.