



Modalità di utilizzo: EasyBath® cuffia shampoo

Cura dei capelli veloce e conveniente

- 1 Preparare un asciugamano, lavarsi le mani ed indossare i guanti da esame, se richiesti.
- 2 Riscaldare le cuffie shampoo EasyBath per 15 secondi nel forno a microonde (1250 watt massimo) o nell'Intelligent Warmer di Medline. Aprire la confezione e prelevare la cuffia.
- 3 Posizionare la cuffia sulla testa del paziente. Se il paziente ha capelli lunghi, bisogna raccogliarli sul capo prima di indossare la cuffia.
- 4 Massaggiare i capelli del paziente attraverso la cuffia finchè non appaiono bagnati: da 1 a 2 minuti per capelli corti e da 2 a 3 minuti per capelli lunghi.
- 5 Rimuovere la cuffia e smaltirla nell'apposito contenitore dei rifiuti. Non necessita di risciacquo.
- 6 Utilizzare un asciugamano per asciugare i capelli del paziente e se necessario pettinare.



RISCALDABILE
NEL MICROONDE

Max. 1250 W
15 secondi



SC230: profumato



SC231: non profumato



Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, potete contattare il vostro account manager o visitare il nostro sito: www.medline.eu/it