




EASYBATH® SHAMPOO MUTS

GEBRUIKSAANWIJZING:

1. Neem een handdoek en een EasyBath® shampoo muts verpakking.
2. Verwarm een gesloten EasyBath® shampoo muts in de Medline intelligente verwarmers of verwarm de verpakking 30 tot 45 sec. in de magnetron (750W).
3. Open de verpakking en plaats de shampoo muts op het hoofd van de patient.
4. Masseer het hoofd van de patient 1-2 minuten voor kort haar en 2-3 minuten voor langer haar.
5. Verwijder de shampoo muts. Afspoelen is niet nodig. Gebruik de handdoek om de haren van de patient af te drogen, daarna doorkammen.

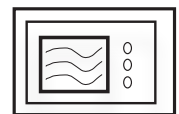

MICROWEAVABLE
750 Watts
30 tot 45 sec

Wilt u meer informatie over onze Easybath® producten, neem dan contact op met uw Medline Account Manager of bekijk eens onze website www.medline.eu/nl.