




**FÁCIL, EFICAZ Y
SEGURA.**

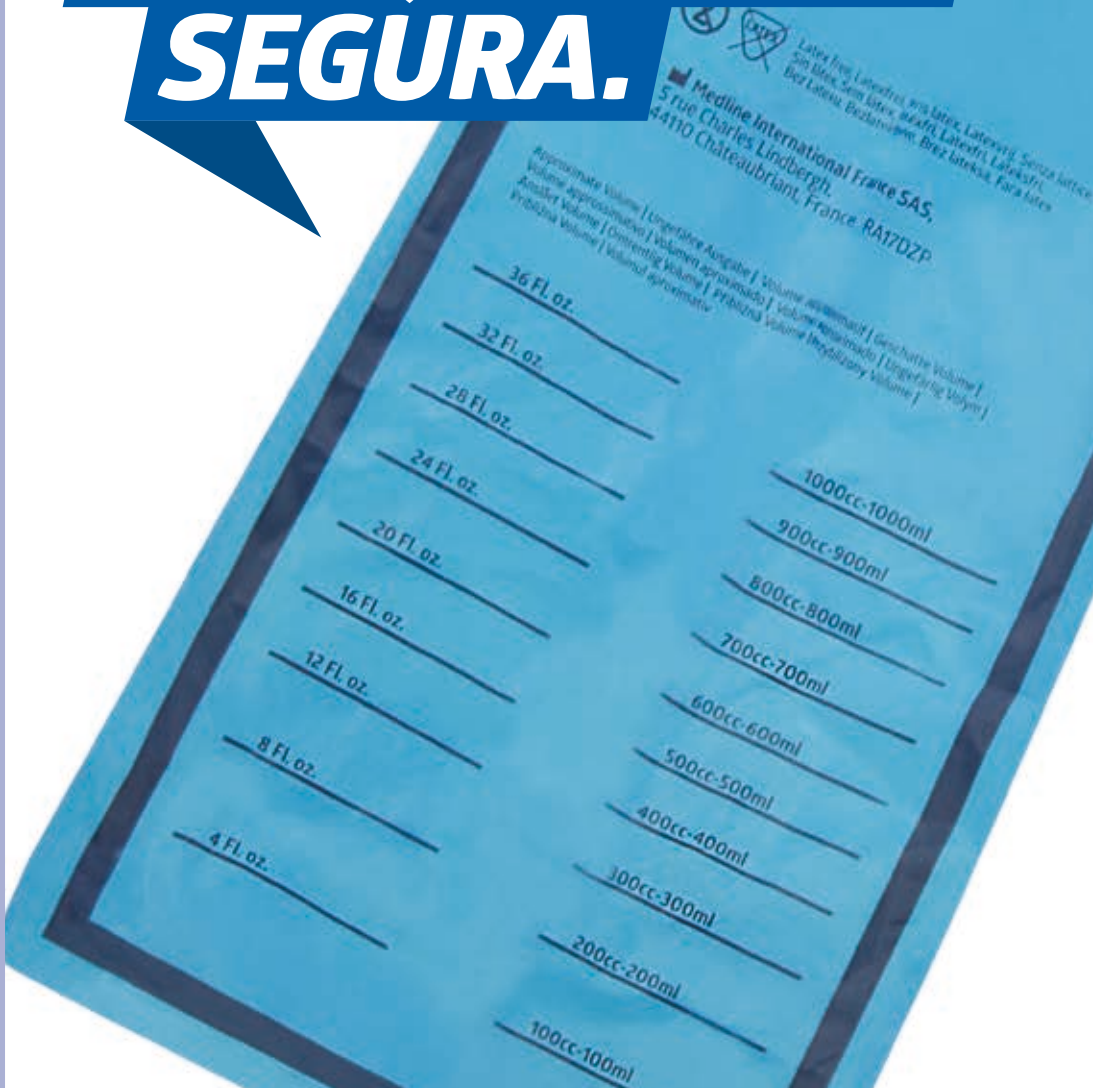

Bolsas de Émesis
Mejora la Experiencia del Paciente

BOLSAS DE ÉMESIS DE MEDLINE

Allí donde aparecen los vómitos,
Las Bolsas de Émesis los tiene controlados.

- Hospital de Día
- Urgencias
- Reanimación/URPA
- Obstetricia
- Hospitalización
- Asistencia a domicilio
- Ambulancias
- Pediatría
- UCI
- Oncología
- Centros de tratamiento del cáncer



Bolsa azul de Émesis EMB01



Bolsa de Émesis – transparente EMB02

Cómo usar las Bolsas de Émesis en 3 pasos


1

Preparar la bolsa: Sostener el anillo de confort y desplegar la bolsa de plástico tirando suavemente hacia abajo y lejos del anillo.



2

Empleo de la bolsa: Cubrir la boca con el anillo de confort durante el vómito, dirigiéndolo hacia el fondo de la bolsa hasta su finalización.

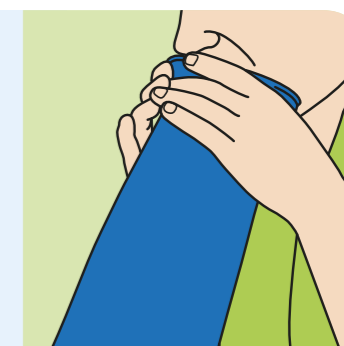

3

Cerrar la bolsa: Estrangular la bolsa con una mano a unos 8 -10 centímetros por debajo del anillo y girar varias veces el anillo hacia uno de los lados. Enganchar la bolsa firmemente retorcida en una de las cuatro muescas alrededor del anillo para mantenerla cerrada. Desechar la bolsa siguiendo los protocolos del centro.



Referencia	Descripción	Invasado
EMB01*	Bolsa Azul de Émesis de Medline	144 uds/caja
EMB02*	Bolsa de Émesis – transparente	144 uds/caja
DISP01	Dispensador de pared para bolsas de Émesis, capacidad 24 bolsas	6 uds/caja

Dispensador de pared DISP01



Descubra las Bolsas de Émesis de Medline

Mejor Experiencia para el Paciente

- Menos salpicaduras y desorden que con las cubetas
- Más privado, más discreto para la dignidad del paciente
- Facilita la autonomía, autoayuda

Más Higiénico

- El vómito queda contenido y cerrado
- Patógenos y elementos contaminantes quedan aislados
- Menos contaminación cruzada en suelos y superficies

Limpieza más rápida

- Es más fácil de limpiar al paciente después de la enfermedad
- Menos cambios de ropa de cama, menos fregado de suelo
- Eliminación de residuos de acuerdo con los protocolos del centro.



Ya disponible!

Para más información, por favor, póngase en contacto con su representante de Medline, o visítenos en nuestra web www.medline.eu/es



**ALWAYS
ON.**

Medline International Iberia S.L.U
Parque Empresarial San Fernando
Avenida de Castilla 2
Edificio Munich, Planta Baja
28830 San Fernando de Henares
Madrid
España
Tfno: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.eu/es
es-atencioncliente@medline.com

*Este dispositivo es un producto sanitario de Clase I no estéril, indicado para ser usado por profesionales de la salud. Antes de usar, consultar las instrucciones de uso y precauciones incluidas en su etiquetado.



Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de corregir cualquier error que pueda haberse producido.
© 2019 Medline Industries, Inc. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, Inc. ML527-ES 09/2019.