




**PULIZIA RAPIDA
E IGIENICA.**

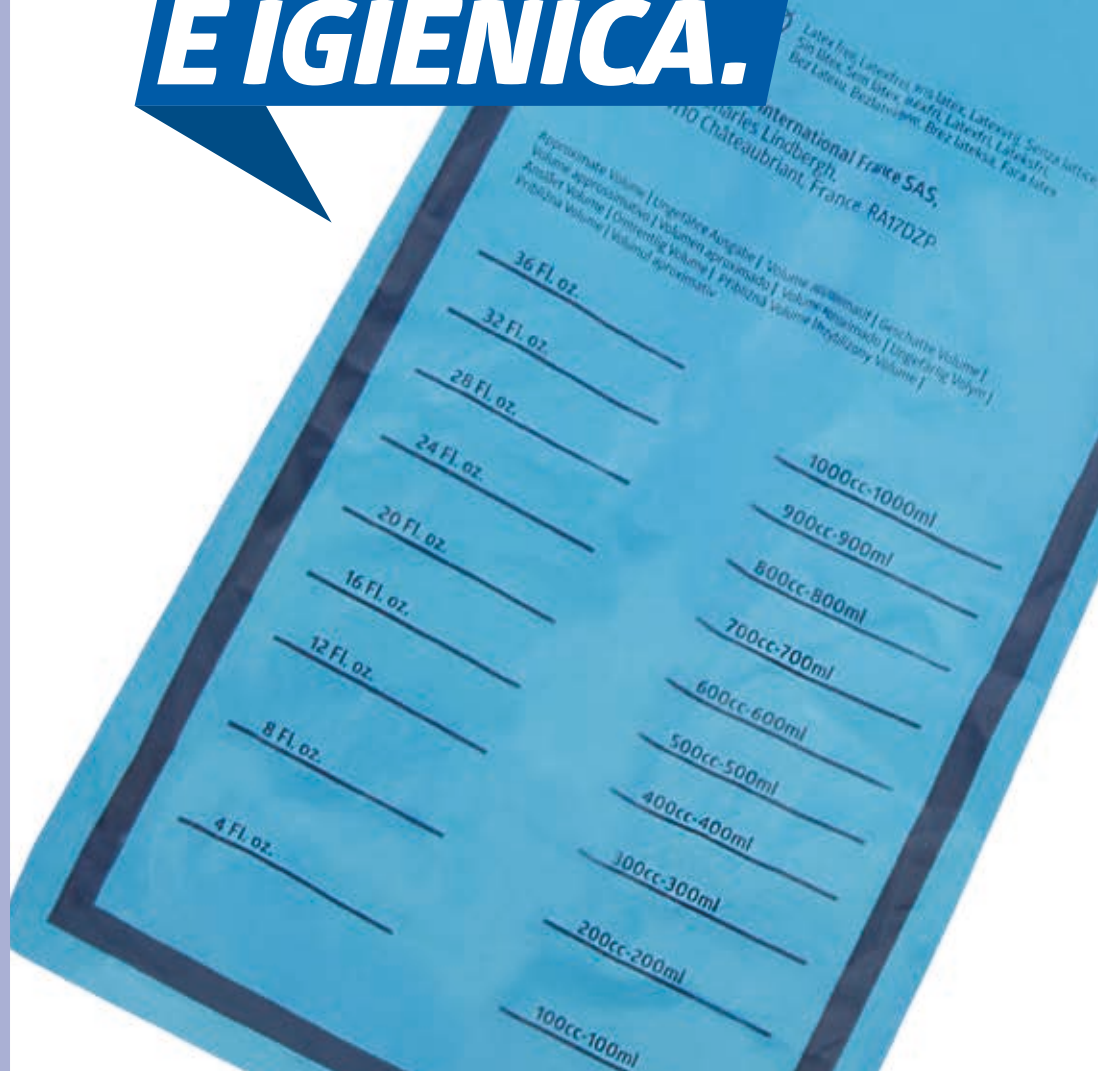

Sacchetto di raccolta vomito
Migliore Esperienza per il paziente

SACCHETTO RACCOLTA VOMITO DI MEDLINE

Ovunque si verifichi il rigurgito, il sacchetto raccolta aiuta a gestirlo.

- Pronto Soccorso
- Post-operatorio
- Ostetricia/Ginecologia
- Reparti
- Ambulanza
- Assistenza sanitaria domiciliare
- Pediatria
- Oncologia
- Centri per il Trattamento dei Tumori
- Terapia Intensiva/ Rianimazione



Sacchetto raccolta vomito - blu EMB01



Sacchetto raccolta vomito - trasparente EMB02

Utilizzo del sacchetto raccolta vomito


1

Preparazione per l'uso. Mantenere l'anello di supporto e spingere il sacchetto di plastica spingendolo delicatamente verso il basso fuori dall'anello.



2

Come usare il sacchetto di raccolta vomito. Coprire la bocca con l'anello di supporto durante il rigurgito, dirigendo il vomito nel sacchetto fino al termine del conato.

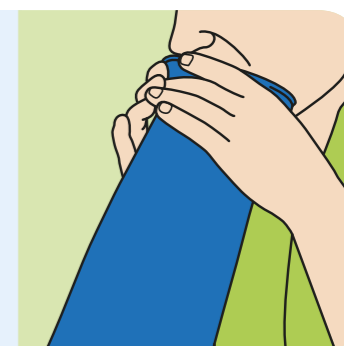

3

Contenuto sicuro. Stringere il sacchetto 8-10 cm al di sotto dell'anello e ruotare l'anello. Infilare il sacchetto attorcigliato in una delle quattro tacche intorno all'anello in modo da mantenerlo chiuso. Smaltire secondo le direttive sanitarie.



Codice articolo	Descrizione	Confezionamento
EMB01*	Sacchetto raccolta vomito - blu	144 pz/conf.
EMB02*	Sacchetto raccolta vomito - trasparente	144 pz/conf.
DISP01	Dispenser a muro per sacchetto raccolta vomito, capacità 24 pezzi	6 pz/conf.

Dispenser DISP01



Vantaggi del sacchetto di raccolta vomito Medline

Migliore esperienza per il paziente

- Minori schizzi e disordine rispetto alla bacinella
- Maggior privacy, più discreto per la dignità del paziente
- Migliora l'indipendenza

Più igienico

- Il vomito è contenuto e chiuso
- Gli agenti contaminanti e patogeni sono isolati
- Minor contaminazione crociata su pavimento e superfici

Pulizia più rapida

- Maggior facilità nel pulire il paziente dopo il vomito
- Minor biancheria da sostituire e pavimento da sanificare
- Smaltimento nei contenitori di rifiuti ospedalieri



Disponibile ora!

Per maggiori informazioni contatta il tuo venditore Medline o visita il nostro sito web www.medline.eu/it



**ALWAYS
ON.**

Medline International Italy s.r.l. Unipersonale
Piazzale della Resistenza 3
50018 Scandicci
Firenze
Italia
Tel.: +39 55 776 65 11
Fax: +39 55 34 01 12
www.medline.eu/it
it-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle
1204 Ginevra
Svizzera
Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100
www.medline.eu/it
ch-customerservice@medline.com

*Questo prodotto è un dispositivo medico di Classe I non sterile destinato ad essere utilizzato da professionisti sanitari. Prima dell'utilizzo consultare le istruzioni per l'uso e le precauzioni sull'etichettatura corrispondente.



Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France



Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori presenti in questa brochure.

© 2019 Medline Industries, Inc. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, Inc. ML527-IT 08/2019.