

Für erhöhten Patientenkomfort



# Spuckbeutel

Der Spuckbeutel zum Einmalgebrauch von Medline bietet eine sichere und einfache Lösung. Das Produkt ermöglicht dem medizinischen Personal außerdem eine schnelle und hygienische Reinigung.

Unser einfach zu handhabender Spuckbeutel lässt sich leicht mit einem Komfortring aus Plastik verschließen und isoliert auf diese Weise Verunreinigungen, Krankheitserreger und unangenehme Gerüche. Dies vermindert Kreuzkontaminationen von Böden und anderen Oberflächen; zudem fallen weniger Wäschewechsel und Bodenreinigungen an.

## Verbesserter Patientenkomfort

- Weniger Verunreinigungen als bei Nierenschalen
- Mehr Privatsphäre und Diskretion
- Höhere Unabhängigkeit und Selbsthilfe

## Verbesserte Hygiene

- Geschlossener und bedeckter Vomit
- Verunreinigungen und Krankheitserreger werden isoliert
- Weniger Kreuzkontamination von Böden und anderen Oberflächen

## Schnelle Reinigung

- Reduzierter Waschaufwand am Patienten
- Weniger Wäschewechsel und weniger Wischen der Böden
- Entsorgungsmöglichkeit im regulären oder roten Müllsack

Unser Spuckbeutel finden Anwendung in zahlreichen Krankenhausbereichen: Zentrale Notaufnahme, OP-Nachsorge, Geburtshilfe und Gynäkologie, Rettungsdienst, häusliche Krankenpflege, Pädiatrie, Onkologie, Krebsbehandlungszentren und Intensivstationen.


## Einige Ursachen für Erbrechen

- Chemotherapie und andere Krebsbehandlungen
- Übelkeit nach einer OP
- Schwangerschaft
- Infektionen und Krankheiten
- Reisekrankheit

## Darum sind Spuckschalen aus Papier oder Metall unzureichend

- Höherer Anteil an Erbrochenem spritzt zurück
- Intimsphäre des Patienten wird nicht gewahrt
- Keine sehr saubere und hygienische Methode
- Es können mehr Kreuzkontaminationen von Oberflächen auftreten
- Nicht einfach zu reinigen und zu entsorgen

## So funktioniert es:

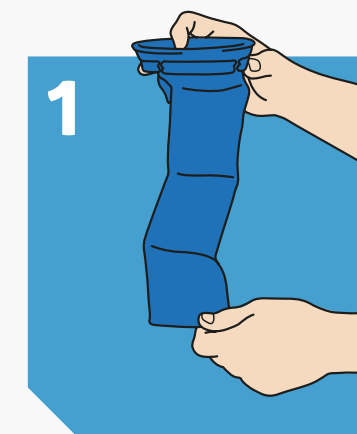

Den Ring festhalten und den Kunststoffbeutel vorsichtig nach unten ziehen (weg vom Ring), sodass sich der Beutel entfaltet.



Den Ring mit dem Mund abdecken und in den Beutel erbrechen.



Ein Auslaufen des Inhalts kann verhindert werden, indem der Beutel festgehalten und am Ring gedreht wird. Den verdrehten Beutel in eine der vier Aussparungen am Ring klemmen, um ihn zu richtig schließen und dann zu entsorgen.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Bitte beachten Sie die Richtlinien Ihrer Einrichtung zur Abfallentsorgung.



+

Dunkle Farbe für mehr Diskretion

+

Fassungsvermögen insgesamt 2 Liter

Transparente Produktvariante verfügbar für eine problemlose Kontrolle



## Spuckbeutel

Dieser Beutel ist insbesondere für Patienten geeignet, die aufgrund einer medikamentösen Therapie/Strahlentherapie unter Übelkeit und Erbrechen leiden. Durch die dunkle Farbe bietet der Spuckbeutel dem Patienten ein hohes Maß an Diskretion.

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackungseinheit
EMB01*	Spuckbeutel - blau	144 Stück/Karton



## Durchsichtiger Spuckbeutel

Dieser Beutel ist ideal für den Einsatz in der Notaufnahme, im Rettungsdienst oder immer dann, wenn die Untersuchung von Erbrochenem erforderlich ist.

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackungseinheit
EMB02*	Transparenter Spuckbeutel	144 Stück/Karton



## Spender für Spuckbeutel

Dieser Spender lässt sich einfach und bequem an der Wand befestigen und fasst bis zu 24 der gefalteten Spuckbeutel. Der Verschlussdeckel schützt die enthaltenen Beutel und hilft so bei der Infektionsprophylaxe.

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackungseinheit
DISP01	Spender für Spuckbeutel; wandmontiert, fasst 24 Stück	6 Stück/Karton



Für weitere Informationen zu unseren Produkten können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Website besuchen: [www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de)



**Medline International Germany GmbH**  
Medline-Straße 1-3  
47533 Kleve  
Deutschland

Tel.: +49 2821 7510-0  
Fax: +49 2821 7510-7802

[www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de)  
[de-customerservice@medline.com](mailto:de-customerservice@medline.com)

**Medline International Switzerland Sàrl**  
1 Place de Longemalle  
1204 Genf  
Schweiz

Tel: +41 848 244 433  
Fax: +41 848 244 100

[www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de)  
[ch-customerservice@medline.com](mailto:ch-customerservice@medline.com)

**Medline Austria GmbH**  
c/o CHSH Cerha, Hempel, Spiegelfeld, Hlawati  
Parkring 2  
1010 Wien  
Österreich

Tel: +43 800 201 878  
Fax: +43 800 201 879

[www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de)  
[at-customerservice@medline.com](mailto:at-customerservice@medline.com)

FOLLOW US  

\*Nicht steriles Medizinprodukt der Klasse I für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal.  
Bitte lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsinformationen und Sicherheitshinweise auf der Verpackung.

Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2021 Medline Industries, Inc. Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, Inc. ML527\_DE 07/2021

Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France

