

Braakzakje en Dispenser

Betere patiëntervaring



**Snel,
hygiënisch
schoonmaken**



Braakzakje

Medline's Disposable Braakzakje is een veilige en makkelijke oplossing voor het opvangen, vasthouden en afvoeren van braaksel. Daarnaast maken ze het voor zorgverleners mogelijk om sneller en hygiënischer op te ruimen.

Onze gebruiksvriendelijke plastic zak kan eenvoudig gesloten worden met een plastic ring, waardoor ziekteverwekkers en nare geurtjes geïsoleerd worden. Dit draagt ook bij aan minder kruisbesmetting op vloeren en andere oppervlakten en minder noodzaak om beddengoed te verwisselen en de vloer schoon te maken.

Braakzakjes helpen de patiëntervaring te verbeteren dankzij de volgende eigenschappen:

Betere patiëntervaring

- Minder spatten en rommel dan een bekken
- Meer privacy en discretie voor de waardigheid van de patiënt
- Verbeterde onafhankelijkheid en zelfredzaamheid

Verbeterde sanitaire voorzieningen

- Weggesloten en afgedekt braaksel
- Geïsoleerde contaminanten en ziekteverwekkers
- Minder kruisbesmetting van vloeren en andere oppervlakten

Sneller op te ruimen

- Makkelijker op te ruimen nadat de patiënt moest overgeven
- Minder vaak beddengoed wisselen en vloeren dweilen
- Mogelijkheid om weg te gooien bij het normale of medisch afval

Ons Braakzakje is goedgekeurd voor gebruik in allerlei afdelingen in het ziekenhuis en daarbuiten, waaronder spoedafdelingen, post-operatief, verloskunde, gynaecologie, ambulancedienst, thuiszorg, kinderafdeling, oncologie, kanker behandelcentra en de IC.

Enkele redenen voor braken

- Chemotherapie en andere behandelingsmethoden voor kanker
- Post-operatieve misselijkheid
- Zwangerschap
- Infecties en ziekten
- Bewegingsziekte

Redenen waarom papieren of metalen bekkens niet genoeg zijn

- Meer opspatten van braaksel
- Niet discreet
- Niet erg schoon en hygiënisch
- Meer kruisbesmetting van andere oppervlakten kan optreden
- Niet eenvoudig op te ruimen




+ Donkere kleur voor extra discretie

+ Totale capaciteit van 2 liter

Transparante optie beschikbaar om inspectie mogelijk te maken



Hoe het werkt:

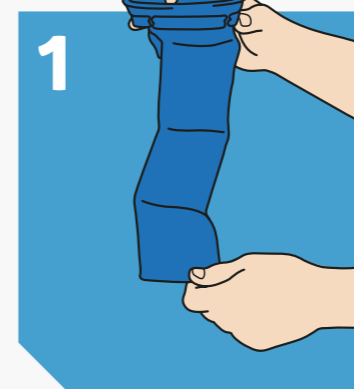

Houd de comfort ring vast en trek de plastic zak rustig naar beneden en weg van de ring en vouw deze daardoor uit.



Bedek uw mond met de comfort ring, en richt het braaksel in de zak.



Sluit de zak af door de zak vast te houden en de ring te draaien.

Stop de strak gedraaide zak in één van de vier inkepingen rond de ring om hem goed af te sluiten en gooi de zak dan weg.*

*Raadpleeg het beleid van het ziekenhuis voor afval alvorens het zakje weg te werpen.

Braakzakje

Het is in het bijzonder bedoeld voor patiënten bij wie het braken wordt veroorzaakt door medicamenteuze behandeling / radiotherapie. De donkere kleur helpt de patiëntervaring te verbeteren door discretie en privacy te bieden.

Productnummer	Omschrijving	Verpakking
EMB01*	Braakzakje - blauw	144/doos



Transparant braakzakje

Het is ideaal voor gebruik in spoedeisende / pre-ziekenhuiszorg of wanneer onderzoek van braaksel nodig is.

Productnummer	Omschrijving	Verpakking
EMB02*	Braakzakje - transparant	144/doos



Braakzakje dispenser

Deze dispenser is eenvoudig en handig aan de muur te bevestigen en biedt plaats aan maximaal 24 van onze gevouwen braakzakjes. Het deksel bedekt de aanwezige braakzakjes en helpt zo bij infectiecontrole.

Productnummer	Omschrijving	Verpakking
DISP01	Dispenser voor braakzakjes; muurbevestiging, voor 24 stuks	6/doos



Voor meer informatie over onze producten kunt u contact opnemen met uw Medline accountmanager of bezoek onze website: www.medline.eu/nl



Medline International B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900
Fax: +31 88 00 11 929
www.medline.eu/nl
netherlands@medline.com

Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900
Fax: +31 88 00 11 929
www.medline.eu/nl
nl-customerservice@medline.com

Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
België
Tel: +32 2 808 74 93
Fax: +32 2 400 19 39
www.medline.eu/nl
be-customerservice@medline.com

FOLLOW US 

*Dit product is een klasse I niet-steriel medisch hulpmiddel bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

 Medline International Netherlands B.V.
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Frankrijk 

Wij behouden ons het recht voor om mogelijke fouten in deze brochure te verbeteren.

© 2021 Medline Industries, Inc. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, Inc. ML527_NL 06/2021