

# Ultraschallbezüge für endokavitäre Sonden



Schutzbarriere für transrektale und transvaginale Ultraschalluntersuchungen

Die Ultraschallbezüge von Medline gewährleisten eine sichere und hygienische Anwendung von Ultraschallgeräten bei transrektalen und transvaginalen Untersuchungen. Sie sind mit den meisten Ultraschallsystemen kompatibel.

Die Sondenbezüge bieten maximalen Schutz vor Kreuzkontaminationen sowohl für den Patienten und das Personal, als auch für die Geräte. Darüber hinaus wird die Zeit verkürzt, die für die Entfernung von Gel, Exkrementen und anderen Verunreinigungen benötigt wird, denen die Sonden bei intrakavitären medizinischen Untersuchungen normalerweise ausgesetzt sind.



## Einsatzgebiete

Alle endokavitären Ultraschallbezüge von Medline können bei gynäkologischen, urologischen und proktologischen Eingriffen verwendet werden.

Die Ultraschallbezüge haben ein universelles Design und sind passend für die meisten Ultraschallwandler. Erhältlich in Latex und latexfreiem Material

## Vorteile und Eigenschaften



**Kompatibel** mit den meisten Sonden



**Sterile und unsterile** Ultraschallbezüge verfügbar



**Transparent** für gute Sichtbarkeit und klare Bilder




**Mit Gleitgel** verfügbar



**Wirksame Barriere mit** und ohne Latex (Polyisopren), zur Vermeidung allergischer Reaktionen bei Patienten und/oder medizinischem Personal. Besonders weiche und widerstandsfähige Materialien.

## Hinweise zur Anwendung

1

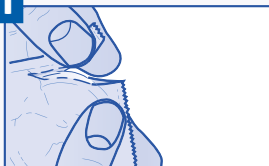


Öffnen Sie die Verpackung vorsichtig an den vorgesehenen Kanten. Gehen Sie vorsichtig vor, um den Ultraschallbezug nicht zu beschädigen.

2



Bringen Sie den Sondenbezug auf die Sonde an. Achten Sie darauf, keine Blasen oder Falten zu hinterlassen, die die Sichtbarkeit und die Bildqualität beeinträchtigen könnten. Bei Bedarf kann auch Gel auf die Sonde aufgetragen werden.

3

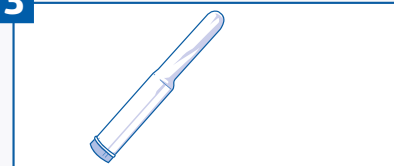

Sobald die Sonde vollständig abgedeckt ist, überprüfen Sie das Gerät ein letztes Mal, um sicherzustellen, dass keine Blasen oder Öffnungen vorhanden sind, die die Wirksamkeit des Bezugs beeinträchtigen könnten.

## Bestellinformationen

### Ultraschallbezüge, endokavitär, Latex

Artikelnummer	Maße	Packungseinheit	Steril
NS-ICE28295L	28 mm x 295 mm	144 Stück/Box; 2.880 Stück/Karton	Nein
NS-ICE33230L	33 mm x 195 mm	144 Stück/Box; 2.880 Stück/Karton	Nein
NS-ICE33230LL*	33 mm x 195 mm	144 Stück/Box; 2.880 Stück/Karton	Nein
ICE28295L	28 mm x 295 mm	100 Stück/Box; 2000 Stück/Karton	Ja
ICE33230L	33 mm x 195 mm	100 Stück/Box; 2000 Stück/Karton	Ja

\* mit Gleitgel

### Ultraschallbezüge, endokavitär, latexfrei (Polyisopren)

Artikelnummer	Maße	Packungseinheit	Steril
NS-ICE28295P	28 mm x 295 mm	100 Stück/Box; 2000 Stück/Karton	Nein
ICE28295P	28 mm x 295 mm	100 Stück/Box; 2000 Stück/Karton	Ja

**Für weitere Informationen** können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: [www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de)



Medline International Germany GmbH  
Medline-Straße 1-3  
47533 Kleve  
Deutschland  
Tel.: +49 2821 7510-0

[www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de)  
[de-customerservice@medline.com](mailto:de-customerservice@medline.com)

Medline International Switzerland Sàrl  
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associates SA  
1204 Genf  
Schweiz  
Tel.: +41 848 244 433

[www.medline.eu/ch](http://www.medline.eu/ch)  
[ch-customerservice@medline.com](mailto:ch-customerservice@medline.com)

Medline Austria GmbH  
c/o CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld, Hlawati  
Parkring 2  
1010 Wien  
Österreich  
Tel.: +43 800 201 878  
[www.medline.eu/at](http://www.medline.eu/at)  
[at-customerservice@medline.com](mailto:at-customerservice@medline.com)

FOLLOW US  