

# Endocavitaire sondehoes



Een beschermingsoplossing voor transrectale en transvaginale echo procedures

De Medline Endocavitaire Sondehoes dient als barrière tegen virussen voor transrectale en transvaginale echo's. Het product is geschikt voor de meeste echosondes.

De hoes biedt maximale bescherming tegen kruisbesmetting voor zowel de patiënt als apparatuur. Het helpt ook de tijd te verkorten die nodig is om gel, uitwerpselen en ander vuil te verwijderen waaraan de sonde normaal gesproken wordt blootgesteld tijdens intracavitair medisch onderzoek.

## Gebruik

De Medline Endocavitaire Sondehoes kan gebruikt worden tijdens gynaecologische, urologische en proctologische ingrepen.

## Voordelen en eigenschappen



**Compatibel** met de meeste ultrasone transducers



**Steriel en niet steriele** echo sondehoezen verkrijgbaar



**Transparant**, voor goede zichtbaarheid en duidelijke beelden



**Glijmiddel is een optie** om een optimale pasvorm te garanderen



**Effectieve barrière met** latex en latexvrije (polyisopreen) optie om allergische reacties bij patiënten en personeel te helpen voorkomen; het materiaal is zacht en zeer stevig.




Deze covers passen perfect op de meeste transducers. Ze zijn verkrijgbaar in zowel latex als latexvrij materiaal, steriel en niet steriel, om optimaal aan uw behoeften te voldoen.



## Gebruiksaanwijzing

1

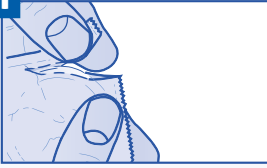


Scheur voorzichtig de verpakking open langs de randen of hoeken. Ga voorzichtig om met de endocavitare sondehoes om gaatjes te voorkomen.

2



Plaats de afdekking over de transducer. Zorg ervoor dat er geen luchtballen of vouwen achterblijven die een goede zichtbaarheid en beeldvorming kunnen belemmeren. Je kunt indien nodig ook gel op de transducer aanbrengen.

3

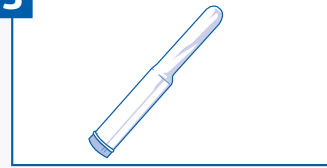

Als de transducer volledig bedekt is, inspecteer het instrument dan nog een laatste keer om er zeker van te zijn dat er geen luchtballen of openingen zijn waardoor de hoes minder goed zou werken.

## Bestelinformatie

### Latex endocavitare sondehoezen

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking	Steriel
NS-ICE28295L	28 x 295 mm	144 st/doos; 2880 st/omdoos	Nee
NS-ICE33230L	33 x 195 mm	144 st/doos; 2880 st/omdoos	Nee
NS-ICE33230LL*	33 x 195 mm	144 st/doos; 2880 st/omdoos	Nee
ICE28295L	28 x 295 mm	100 st/doos; 2000 st/omdoos	Ja
ICE33230L	33 x 195 mm	100 st/doos; 2000 st/omdoos	Ja

\*Met glijmiddel

### Polyisopreen endocavitare sondehoezen

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking	Steriel
NS-ICE28295P	28 x 295 mm	100 st/doos; 2000 st/omdoos	Nee
ICE28295P	28 x 295 mm	100 st/doos; 2000 st/omdoos	Ja

**Voor meer informatie:** Neem contact op met uw Medline accountmanager of bezoek onze website: [www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)



**Medline International B.V.**  
Nieuwe Stationsstraat 10  
6811 KS Arnhem  
Nederland  
Tel: +31 88 00 11 900

[www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)  
[netherlands@medline.com](mailto:netherlands@medline.com)

**Medline International Netherlands B.V.**  
Nieuwe Stationsstraat 10  
6811 KS Arnhem  
Nederland  
Tel: +31 88 00 11 900

[www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)  
[nl-customerservice@medline.com](mailto:nl-customerservice@medline.com)

**Medline International Belgium BV**  
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8  
1060 Saint-Gilles  
Commercial address: Culliganlaan 2G  
1831 Diegem (Machelen)  
België  
Tel: +32 2 808 74 93  
[www.medline.eu/be](http://www.medline.eu/be)  
[be-customerservice@medline.com](mailto:be-customerservice@medline.com)

FOLLOW US  

Deze producten zijn klasse IIa medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

Wij behouden ons het recht voor om mogelijke fouten in deze brochure te verbeteren.

© 2024 Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1370\_NL 01/2024



Advena Limited  
Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower  
Street, Swatar, BKR 4013 Malta

