



Disposabe chirurgische handborstel.

Disposabe chirurgische handborstel geinpregneerd met providon-jodium (7,5%).
Gebruikers handleiding. REF 205 02

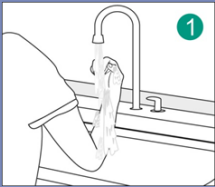


1

Handen, polsen en onderarmen nat maken met water. Handen altijd hoger houden dan de ellebogen

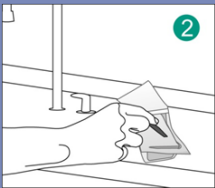


2

Nagels reinigen met de nagelreiniger

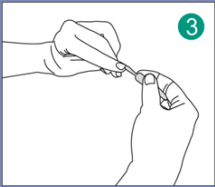

3


Gebruik de borstelkant om de nagels te reinigen, nagelriemen en de ruimtes tussen de vingers en de sponszijde om de handen en onderarmen te reinigen. In de natte spons knijpen voor extra schuim

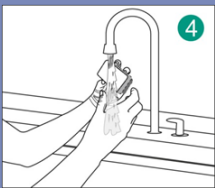


4



5

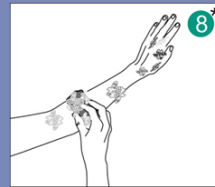


8*

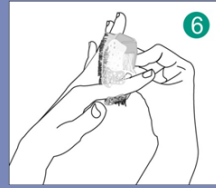

6



9*

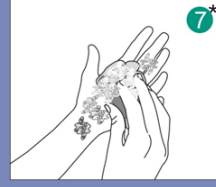


7*

Reinig de nagels, nagelriemen en vingers, handen en onderarmen gedurende 3 minuten
* Reinig nog een extra 4 minuten met alleen het zachte sponsgedeelte van de borstel




10

Afspoelen met een ruime hoeveelheid water

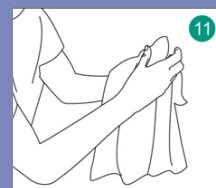

11

Afdrogen met een (steriele) handdoek van de handen naar de ellebogen. Handen hoog houden

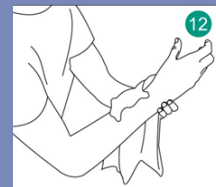

12

medbar®