

# Anwendung: Untersuchungsmasken

Es wird empfohlen, die Maske alle drei Stunden zu wechseln.



1

Die Hände nach den geltenden Hygienerichtlinien reinigen.



2

Der Medline Aufdruck befindet sich an der Außenseite und der formbare Nasenbügel im oberen Maskenbereich.



3

Die Schlaufen hinter die Ohren ziehen und die Haube darüber positionieren.



4

Den flexiblen Nasenbügel an Ihren Nasenrücken anpassen.



5

Die Maske muss ganz entfaltet sein, sodass Nase und Mund bedeckt sind.



6

Bei Spritzgefahr einen geeigneten Augenschutz verwenden.



7

Die Maske nach dem Gebrauch abnehmen und sofort entsorgen.



8

Die Maske ordnungsgemäß entsorgen.



9

Nach der Entsorgung der Maske die Hände waschen.

**Für weitere Informationen zu unseren Untersuchungsmasken** können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: [www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de)