

Comment utiliser un masque de soins

Il est recommandé de changer de masque toutes les 3 heures



1

Lavez-vous les mains avant de toucher le masque



2

Assurez-vous que le logo Medline soit tourné vers l'extérieur et que la barrette nasale soit placée en haut



3

Placez les élastiques derrière les oreilles et couvrir avec une coiffe



4

Ajustez la barrette nasale à l'arête de votre nez



5

Assurez-vous que les plis soient complètement ouverts pour couvrir le nez, la bouche et le menton



6

En cas de risque projections, utilisez une protection oculaire appropriée



7

Après utilisation, retirez le masque avec précaution



8

Jetez le masque dans la poubelle appropriée



9

Lavez-vous les mains après avoir jeté le masque

Pour plus d'informations sur les masques de soins, merci de contacter votre Responsable Commercial Medline ou consultez notre site Internet sur : www.medline.eu/fr

